

ZÁRUČNÍ LIST

Datum prodeje:

Razítko a čitelný podpis prodávajícího:

- 1) Firma Ortgrou Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava – Vítkovice tímto dává záruku na výrobek 2 roky ode dne vydání zboží kupujícímu.
- 2) V záruční době se Ortgrou Medical s.r.o. zavazuje vykonat nevyhnutelné opravy za účelem možnosti opětovného používání zboží v termínu do 30 dní od obdržení reklamace.
- 3) Ortgrou Medical s.r.o. si vyhrazuje právo výměny zboží v případě, že náklady na opravu uzná za nerentabilní.
- 4) V případě zjištění nesprávného fungování zboží je potřebné jej bezodkladně odeslat na adresu prodejce nebo kontaktovat prodejce.
- 5) Před použitím výrobku je potřeba se seznámit s návodem na použití a řídit se instrukcemi v něm uvedenými. Použití výrobku v rozporu s jeho určením ztrácí nárok na záruku. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé použitím výrobku v rozporu s tímto návodem k použití nebo v případě nedodržení instrukcí obsažených v tomto návodu k použití.
- 6) Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé ostrým předmětem, poškození vzniklé v důsledku působení vnějších mechanických sil, znečištění zboží mastnými substancemi či benzínem.
- 7) TENTO ZÁRUČNÍ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNĚ SPOLU S DOKLADEM O KOUPI. V PŘÍPADĚ REKLAMACE PROSÍME O PŘILOŽENÍ DOKLADU O KOUPI. Reklamacie bez dokladu o koupi nebudou akceptované.
- 8) TENTO ZÁRUČNÍ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNĚ SPOLU S DOKLADEM O KOUPI. V PŘÍPADĚ REKLAMACE PROSÍME O PŘILOŽENÍ DOKLADU O KOUPI.
- 9) Reklamacie zaslané bez dokladu o koupi nebo bez záručního listu nebudou přijaty (akceptovány).



ANTAR Sp. J. I.Groniecka-Tarnkowska, A.Tarnkowski
ul. Zawiańska 43 03-068 Warszawa, Polsko
email antar@antar.net
tel 22 518 36 00

Distribuce: Ortgrou Medical s.r.o.,
1.Máje 3236/103, 703 00 Ostrava - Vítkovice
E-mail: ortgroup@ortgroup.cz,
www.ortgroup.cz
Tel.: 596 630 615

v.1-2 29.07.2021

Datum vydání: 29.07.2021r



NÁVOD K POUŽITÍ OPORA ZAD AT02020



PŘÍSTUP

Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt. Před použitím si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku. Nesprávné použití může vést ke zranění, zranění nebo nehodám. Proto, pro bezpečné a úspěšné používání výrobku, přečtěte si prosím pozorně tuto příručku.

POZNÁMKA:

Všechny části by měly být zkontrolovány na poškození způsobené během přepravy. Pokud si všimnete takového poškození, NEPOUŽÍVEJTE výrobek. Další informace získáte od výrobce.

DOPORUČENÍ NA BEZPEČNOSTNÍ POSTUPY

Chcete-li zachovat bezpečnost během používání, postupujte podle níže uvedených pokynů.

POZNÁMKA:

Během používání výrobku a manipulace s ním může existovat riziko zachycení a/nebo stlačení částí těla uživatele/doprovázející osoby v otvorech/mezerách mezi součástmi. Tyto kroky by měly být prováděny s velkou opatrností.

POZNÁMKA:

V případě "závažné nežádoucí příhody" vztahující se k prostředku, která přímo nebo nepřímo vede, mohla vést nebo může vést k následujícím:

- úmrtí pacienta, uživatele nebo jiné osoby, nebo
- dočasné nebo trvalé zhoršení zdravotního stavu pacienta, uživatele nebo jiné osoby, nebo
- vážnou hrozbu pro veřejné zdraví;

Tato "závažná nežádoucí příhoda" musí být ohlášena výrobcí a příslušnému orgánu státu členský stát, ve kterém má uživatel nebo pacient bydliště. V případě ČR je příslušným orgánem Úřad pro registraci léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a biocidních přípravků. Uživatel/pacient jsou povinni písemně oznámit výrobcí nebo zplnomocněnému zástupci a SÚKL jakoukoliv nežádoucí příhodu, která vznikla v souvislosti s použitím zdravotnického prostředku.

POZNÁMKA:

V případě bolesti, alergických reakcí nebo jiných rušivých příznaků, které jsou uživateli nejasné a které souvisejí s používáním zdravotnického prostředku, je třeba konzultovat zdravotnického pracovníka.

POZNÁMKA:

Pokud pocítíte bolest, velké nepohodlí nebo alergickou reakci, kontaktujte co nejdříve lékaře.

POZNÁMKA:

Výrobce neodpovídá za škody způsobené zanedbáním údržby, nedostatečným servisem nebo nedodržováním doporučení obsažených v této uživatelské příručce.

POZNÁMKA:

Pokud není zařízení používáno správně, může existovat riziko zranění. Postupujte podle doporučení pro používání produktu.

POZNÁMKA: je zakázáno používat výrobek jiným způsobem než k určenému účelu

Přípravek je vhodný pro zlomeniny, podvrtnutí a dislokace kloubů nohou a onemocnění vyžadující pobyt na lůžku. Podpora se doporučuje také starším lidem, kteří tráví většinu času vsedě.

CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

Zdravotnický pracovník sdělí svou odpovědnost za používání prostředku dospělým a dětem, přičemž zohlední dostupné varianty/velikosti/nezbytné funkce/velikosti a indikace, přičemž zohlední informace poskytnuté výrobcem.

KONTRAINDIKACE:

fyzická nebo duševní omezení, která brání bezpečné manipulaci s prostředkem.

ČIŠTĚNÍ/ÚDRŽBA

Výrobek by měl být vyčištěn vlhkým hadříkem s přísádkem jemného detergentu a poté otřen suchým hadříkem.

Nepoužívejte hrubé předměty, rozpouštědla nebo silné čisticí prostředky.

VLASTNOSTI PRODUKTU:

Speciální opěrka zad AN TAR (AT02020) byla vyvinuta pro lidi, kteří z různých důvodů potřebují zůstat v sedě nebo polovleže po dlouhou dobu. Podpora AN TAR umožňuje nastavit úhel sklonu zad, je pokryta odolnou tkaninou a speciální konstrukce zajišťuje pohodlí při používání. Podpora vám umožní pohodlně jíst jídlo v posteli, sledovat televizi, číst knihy nebo noviny. Bude se hodit i během krátké, několikadenní rekonvalescence. Mohou používat dospělí a starší děti.

OBCHOD

Výrobek by měl být skladován v suché chladné místnosti, mimo vlhkost a přímé sluneční světlo.

OBCHOD:

Výrobek by měl být skladován na suchém místě, nevystavujte přímému slunečnímu záření.

LIKVIDACE

Komunální odpad by měl být odstraňován v souladu s platnými podmínkami odstraňování.

ROZSAH DODÁVKY

Podpora, návod k použití

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Barva: modrá
- Opěrka: 50 x 58 cm.
- Podstavec: 43 x 54 cm