

AT03028
NÁVOD K POUŽITÍ, OCHRANNÁ PODLOŽKA POD PATU



CZ

Děkujeme za zakoupení našeho produktu

Prosíme, pečlivě si přečtěte návod k použití. Výrobek by neměl být používán před jeho přečtením a porozuměním. Pokud nerozumíte varováním, upozorněním nebo doporučením, kontaktujte odborníka v oblasti zdravotní péče nebo prodejce, abyste předešli poškození produktu nebo zranění.

UPOZORNĚNÍ:

Zkontrolujte všechny části výrobku, zda nejsou poškozeny během přepravy. Pokud zjistíte jakékoli poškození, NEPOUŽÍVEJTE výrobek. Více informací u prodejce.

CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

Osoby trpící nemocemi, dysfunkcemi nebo zraněními, k jejichž léčbě/rehabilitaci nebo kompenzaci je tento výrobek určen (viz část o určeném použití výrobku v tomto návodu k použití). Výrobek si může uživatel zakoupit samostatně nebo na doporučení lékaře, terapeuta či jiného odborníka. Ať už si výrobek zakoupíte sami nebo na doporučení lékaře/terapeuta/jiného odborníka, musíte vzít v úvahu dostupné velikosti/potřebné funkce a varianty výrobku, indikace a kontraindikace použití a informace poskytnuté výrobcem.

POUŽITÍ / INDIKACE

Ochranná podložka pod patu je vyrobena z měkké polyuretanové pěny a je určena pro osoby s rizikem vzniku proleženin na patách.

Podložka má tvarovaný vnitřní povrch, který zajišťuje dobrou cirkulaci vzduchu a snižuje tlak podložky na měkké tkáni. Je vybavena suchými zipy pro lepší stabilizaci.

Podložka chrání nohu před oděrkami v oblasti pat a kotníků. Kromě toho podporuje prevenci vzniku proleženin a zajišťuje volnou cirkulaci vzduchu.

KONTRAINDIKACE

Fyzická nebo mentální omezení (např. zrakové postižení), která znemožňují bezpečné používání výrobku.

Poškození kůže: Výrobek není určen k použití při otevřených ranách, vředech, kožních infekcích, popáleninách nebo jiném poškození kůže v oblasti pat a kotníků.

Cévní problémy: Osoby se závažnými problémy s krevním oběhem, jako je trombóza nebo žilní nedostatečnost, by měly před použitím podložky konzultovat lékaře, aby se předešlo zhoršení stavu.

Kožní onemocnění: Osoby trpící kožními chorobami, jako je ekzém, lupénka nebo jiné chronické kožní problémy, by měly před použitím podložky konzultovat dermatologa.

Poruchy citlivosti: Osoby s poruchami citlivosti v nohách (např. neuropatie) by měly před použitím výrobku konzultovat lékaře, aby se předešlo riziku nesprávného přizpůsobení, které by mohlo vést k dalším zraněním.

SEZNAM KOMPONENTŮ

Dvě ochranné podložky pod patu, Návod k použití

VLASTNOSTI

Vyrobeno z polyuretanové pěny

Upevnění na suchý zip

Univerzální velikost: 20 x 17,5 cm

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím se ujistěte, že podložka je čistá a suchá. Pokud je to nutné, jemně ji otřete vlhkým hadříkem.

Umístěte podložku na patu tak, aby tvarovaný vnitřní povrch dobře přiléhal ke kůži v oblasti paty a kotníku. Ujistěte se, že podložka není příliš volná ani příliš těsná, aby byla zajištěna pohodlnost a efektivita.

Po nasazení podložky na patu upevněte suché zipy pro správnou stabilizaci. Zkontrolujte, zda podložka dobře drží na noze, ale není příliš těsná, aby nezpůsobovala tlak. Suché zipy nastavte tak, aby se podložka nepohybovala při chůzi.

Přestávky v používání:

Pokud pocítíte jakékoli nepohodlí nebo podráždění kůže, podložku ihned sejměte. Přerušete její používání v případě jakýchkoli abnormalit a konzultujte lékaře, zejména pokud pocítíte bolest nebo zarudnutí v oblasti pat.

NEŽÁDOUCÍ PŘÍHODA

V případě "vážného incidentu" souvisejícího s produktem, který vede přímo nebo nepřímo, může nebo by mohla vést k některé z následujících událostí:

- a) úmrtí pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
- b) dočasné nebo trvalé zhoršení zdravotního stavu pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
- c) vážné ohrožení veřejného zdraví

tato "závažná událost" musí být nahlášena výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, v němž má uživatel nebo pacient bydliště. V případě ČR je příslušným orgánem SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv, Odbor zdravotnických prostředků. Uživatel/pacient jsou povinni písemně oznámit výrobcí nebo zplnomocněnému zástupci a SÚKL jakoukoliv nežádoucí příhodu, která vznikla v souvislosti s použitím zdravotnického prostředku.

PROHLÁŠENÍ

Na tento výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě s Nařízením (EU) MDR

2017/745 v platném znění a ve shodě s legislativními požadavky ČR na zdravotnické prostředky v platném znění.

UPOZORNĚNÍ:

V případě výskytu bolesti, alergických reakcí nebo jiných znepokojivých, nejasných příznaků souvisejících s používáním zdravotnického prostředku se poraďte se zdravotnickým pracovníkem.

UPOZORNĚNÍ: Použití výrobku jiným způsobem, než k jakému je určen, je zakázáno.

ČIŠTĚNÍ

UPOZORNĚNÍ: NEPRAT V PRAČCE!

Čištění pěny vyžaduje jemný přístup, aby nedošlo k poškození její struktury. Zde je návod, jak ji správně čistit:

Co budete potřebovat:

Jemný čisticí prostředek nebo prostředek na mytí nádobí

Teplá voda

Jedlá soda (volitelně pro odstranění zápachu)

Vysavač (nejlépe s měkkým kartáčovým nástavcem)

Rozprašovací láhev

Měkký hadřík nebo houbička

Enzymatický čisticí prostředek (volitelně na odstranění skvrn)

Postup čištění:

Vysávání pěny:

Odstranění prachu a nečistot: Použijte vysavač s měkkým kartáčem, abyste šetrně vysáli povrch pěny. Tento krok pomůže odstranit prach, nečistoty a usazeniny před mokrým čištěním.

Místní čištění jemným čisticím prostředkem:

Připravte čisticí roztok: Smíchejte několik kapek jemného čisticího prostředku s teplou vodou v rozprašovací láhvi.

Lehce nastříkejte na pěnu: Vyhněte se nadměrnému promočení pěny. Nastříkejte směs pouze na znečištěné místo.

Jemně osušte skvrny: Použijte měkký hadřík nebo houbičku k jemnému osušení oblasti. Netřete, aby nedošlo k poškození struktury pěny.

Opláchněte místo: Pokud je to nutné, lehce postříkejte čistou vodou, abyste odstranili zbytky čisticího prostředku.

Odstraňování odolných skvrn:

Biologické skvrny nebo moč: Použijte enzymatický čistič. Naneste malé množství na skvrnu, nechte chvíli působit (dle pokynů výrobce) a poté jemně osušte čistým hadříkem.

Mastné skvrny: Použijte malé množství prostředku na mytí nádobí nebo speciální čisticí prostředek na čalounění určený pro pěnové materiály.

Dezodorizace (volitelně):

Použití jedlé sody: Posypte pěnu vrstvou jedlé sody a nechte několik hodin nebo přes noc, aby absorbovala pachy.

Odsajte jedlou sodu vysavačem po uplynutí dostatečného času.

Sušení pěny:

Nechte zcela vyschnout na vzduchu: Pěna je velmi savá, takže její vysušení může trvat delší dobu. Nechte ji na dobře větraném místě.

Použijte ventilátor pro urychlení sušení: Nikdy nepoužívejte přímý zdroj tepla, jako je fén, protože může poškodit pěnu. Nejlepší je použít ventilátor s chladným vzduchem.

Ujistěte se, že pěna je před opětovným použitím zcela suchá, aby se zabránilo vzniku plísní a hub.

Čemu se vyhnout:

Nikdy pěnu zcela neponořujte do vody, protože ji bude obtížné vysušit a může se poškodit.

Vyhněte se používání agresivních chemikálií, jako jsou bělidla nebo čisticí prostředky na bázi alkoholu, které mohou oslabit strukturu pěny.

Nevystavujte přímému teplu: Teplu může poškodit strukturu pěny, proto se vyhněte sušení v sušičce nebo použití horkého vzduchu.

SKLADOVÁNÍ

Výrobek skladujte na suchém místě, nevystavujte přímému slunečnímu záření.

LIKVIDACE PRODUKTU

Při likvidaci použitého výrobku je nutné dodržovat příslušné předpisy pro likvidaci odpadu. Výrobek nepatří do komunálního odpadu.

Výrobek obsahuje části, které lze dále recyklovat. Proto jej po ukončení používání zlikvidujte předáním do sběrného dvora.

ZÁRUČNÍ LIST

Datum prodeje:

Razítko a čitelný podpis prodávajícího:

- 1) Firma Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava – Vítkovice tímto dává záruku na výrobek 2 roky ode dne vydání zboží kupujícímu.
- 2) V záruční době se Ortgroup Medical s.r.o. zavazuje vykonat nevyhnutelné opravy za účelem možnosti opětovného používání zboží v termínu do 30 dní od obdržení reklamace.
- 3) Ortgroup Medical s.r.o. si vyhrazuje právo výměny zboží v případě, že náklady na opravu uzná za nerentabilní.
- 4) V případě zjištění nesprávného fungování zboží je potřebné jej bezodkladně odeslat na adresu prodejce nebo kontaktovat prodejce.
- 5) Před použitím výrobku je potřeba se seznámit s návodem na použití a řídit se instrukcemi v něm uvedenými. Použití výrobku v rozporu s jeho určením ztrácí nárok na záruku. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé použitím výrobku v rozporu s tímto návodem k použití nebo v případě nedodržení instrukcí obsažených v tomto návodu k použití.
- 6) Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé ostrým předmětem, poškození vzniklé v důsledku působení vnějších mechanických sil, znečištění zboží mastnými substancemi či benzínem.
- 7) Produkt zaslaný na servis v rámci reklamace nemůže být epidemiologicky ohrožující.
- 8) TENTO ZÁRUČNÍ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNĚ SPOLU S DOKLADEM O KOUPI. V PŘÍPADĚ REKLAMACE PROSÍME O PŘILOŽENÍ DOKLADU O KOUPI.
- 9) Reklamace zaslané bez dokladu o koupi nebo bez záručního listu nebudou přijaty (akceptovány).



ANTAR Sp. J.
I.Groniecka-Tarnkowska, A.Tarnkowski
ul. Zawisłańska 43 03-068 Warszawa, Polsko
email antar@antar.net tel 22 518 36 00

PRVNÍ KONTAKT: Distribuce:

Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava - Vítkovice
E-mail: ortgroup@ortgroup.cz, www.ortgroup.cz
Tel.: 596 630 615

Datum vydání návodu: 04.02.2025
v1-04.02.2025

