

AT51011/AT51012
NÁVOD K POUŽITÍ, ŽIDLE DO SPRCHY



CZ

Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Prosíme, abyste si pečlivě přečetli tento návod k použití. Výrobek nepoužívejte, dokud si tuto příručku nepřečtete a neporozumíte jí. Pokud nerozumíte upozorněním, poznámkám a doporučením, obraťte se na zdravotnického specialistu nebo prodejce, abyste předešli poškození výrobku nebo zranění.

UPOZORNĚNÍ: Zkontrolujte všechny části z hlediska poškození během přepravy. Pokud zjistíte jakékoli poškození, NESMÍTE výrobek používat. Více informací vám poskytne prodejce.

CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

Osoby trpící nemocemi, dysfunkcemi nebo zraněními, k jejichž léčbě/rehabilitaci nebo kompenzaci je tento výrobek určen (viz část o určeném použití výrobku v tomto návodu k použití). Výrobek si může uživatel zakoupit samostatně nebo na doporučení lékaře, terapeuta či jiného odborníka. Ať už si výrobek zakoupíte sami nebo na doporučení lékaře/terapeuta/jiného odborníka, musíte vzít v úvahu dostupné velikosti/potřebné funkce a varianty výrobku, indikace a kontraindikace použití a informace poskytnuté výrobcem.

POUŽITÍ

Sprchové židle pro osoby se zdravotním postižením jsou určeny pro osoby s omezenou pohyblivostí. Umožňují nebo usnadňují bezpečné a pohodlné používání sprchy. Výrobek usnadňuje hygienu osobám, které: mají omezenou pohyblivost, mají problémy s rovnováhou nebo stabilitou, mají potíže s dlouhým stáním, jsou v rekonvalescenci po úrazech nebo operacích, jsou starší a potřebují dodatečnou podporu při koupání. Židle může být použita v domácnosti, pečovatelských zařízeních, nemocnicích i domovech pro seniory.

INDIKACE

Použití sprchové židle se doporučuje v případech: svalové nebo kloubní slabosti, neurologických nebo ortopedických onemocnění ovlivňujících mobilitu, závratí nebo sklonu k mdlobám, poruch rovnováhy (např. Parkinsonova choroba, roztroušená skleróza), pooperačního období, kdy pacient nemůže dlouho stát, osob s nadváhou (s ohledem na maximální zatížení 136 kg).

KONTRAINDIKACE

Použití sprchové židle se nedoporučuje: u osob překračujících maximální nosnost (136 kg), ve sprchových koutech nebo vanách, kde není možné zajistit stabilní postavení všech nohou židle, při poškození konstrukčních prvků (praskliny, deformace, chybějící montážní prvky), u osob s vážnými poruchami vědomí nebo chování, které znemožňují bezpečné použití, u dětí bez neustálého dozoru dospělých, u fyzických nebo duševních omezení (např. zrakové postižení), které brání bezpečné manipulaci s výrobkem.

SEZNAM KOMPONENTŮ: Sedák – 1 ks Nohy s nastavitelnou výškou a gumovou protiskluzovou koncovkou – 4 ks Návod k Polit Produkt AT51012 navíc obsahuje: Opěradlo – 1 ks Područky – 2 ks

VLASTNOSTI PRODUKTU

Ergonomický tvar přizpůsobený uživateli

Dvojitý U-tvarovaný sedák s odtokovými otvory pro lepší hygienu

Výškově nastavitelný v pěti úrovních

Protiskluzové gumové koncovky zajišťující stabilitu na mokřem povrchu

Snadná montáž a demontáž bez použití nářadí

Výřez pro sprchovou hadici

AT51012: s opěradlem

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál: PP plast, hliník, guma

Max. nosnost: 136 kg

Nastavení výšky: 5 úrovní

ROZMĚRY AT51011

Celková šířka: 55 cm

Celková výška: 42–55 cm (nastavitelná)

Šířka sedadla: 55 cm

Hloubka sedadla: 41 cm

Hloubka výřezu ve tvaru „U“: 17 cm

Hmotnost: 2 kg

ROZMĚRY AT51012

Celková šířka: 55 cm

Celková výška: 80–91 cm (nastavitelná)

Výška sedadla od podlahy: 42–55 cm (nastavitelná)

Šířka sedadla: 55 cm

Hloubka sedadla: 41 cm

Hloubka výřezu ve tvaru „U“: 17 cm

Výška opěradla: 19 cm

Hmotnost: 3 kg

UPOZORNĚNÍ: Rozměry se mohou lišit o ± 2 cm.



Tento symbol označuje maximální hmotnost uživatele.

MONTÁŽ

Vyjměte sedák a otočte jej vzhůru nohama. Vložte čtyři nohy do příslušných otvorů a otočte je, aby se zajistily.



Nastavte všechny nohy na stejnou výšku (5 úrovní).



Vložte opěradlo do zadních otvorů sedáku.



NEŽÁDOUCÍ PŘÍHODA

V případě "vážného incidentu" souvisejícího s produktem, který vede přímo nebo nepřímo, může nebo by mohla vést k některé z následujících událostí:

- a) úmrtí pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
- b) dočasné nebo trvalé zhoršení zdravotního stavu pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
- c) vážné ohrožení veřejného zdraví

tato "závažná událost" musí být nahlášena výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, v němž má uživatel nebo pacient bydliště. V případě ČR je příslušným orgánem SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv, Odbor zdravotnických prostředků. Uživatel/pacient jsou povinni písemně oznámit výrobcí nebo zplnomocněnému zástupci a SÚKL jakoukoliv nežádoucí příhodu, která vznikla v souvislosti s použitím zdravotnického prostředku. **PROHLÁŠENÍ:** Na tento výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě s Nařízením (EU) MDR 2017/745 v platném znění a ve shodě s legislativními požadavky ČR na zdravotnické prostředky v platném znění.

UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze k určenému účelu – židle je určena výhradně k sezení při sprchování. Nepřekračujte maximální zatížení – povolená hmotnost uživatele je 136 kg. Umístěte na stabilní a rovný povrch – před použitím se ujistěte, že všechny nohy stojí rovnoměrně a pevně na podlaze. Zkontrolujte stabilitu před usednutím – vždy ověřte, že je židle správně sestavena a všechny části dotaženy. Dbejte opatrnosti při usedání a vstávání – přidržujte se stabilních madel nebo koupelnových zábradlí. Nepoužívejte poškozenou židli – praskliny, deformace nebo opotřebované části mohou vést k pádu. Neměňte konstrukci – jakékoliv úpravy mohou snížit bezpečnost používání. Používejte za přítomnosti opatrovníka, pokud hrozí riziko ztráty rovnováhy, poruch vědomí nebo mdlob. Pravidelně kontrolujte nastavovací prvky – ujistěte se, že výška nohou je stejná a mechanismus funguje správně.

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA: Po každém použití opláchněte židli čistou vodou, abyste odstranili zbytky mýdla nebo šamponu. Používejte měkký hadřík nebo houbičku a jemný čistící prostředek. Nepoužívejte agresivní chemikálie, rozpouštědla ani abraziva. Po vyčištění otřete dosucha nebo nechte vyschnout na vzduchu. Pravidelně kontrolujte všechny části – zejména gumové koncovky, upevnění nohou, područky a opěradlo. Povolané šrouby nebo upevnění dotáhněte. Při prasklinách, deformacích nebo jiném poškození konstrukce výrobek nepoužívejte, dokud nebude opraven nebo vyměněn.

SKLADOVÁNÍ: Skladujte na suchém místě, nevystavujte přímému slunečnímu záření.

LIKVIDACE PRODUKTU: Při likvidaci použitého výrobku je nutné dodržovat příslušné předpisy pro likvidaci odpadu. Výrobek nepatří do komunálního odpadu. Výrobek obsahuje části, které lze dále recyklovat. Proto jej po ukončení používání zlikvidujte předáním do sběrného dvora.

ZÁRUČNÍ LIST

Datum prodeje:

Razítko a čitelný podpis prodávajícího:

- 1) Firma Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava – Vítkovice tímto dává záruku na výrobek 2 roky ode dne vydání zboží kupujícímu.
- 2) V záruční době se Ortgroup Medical s.r.o. zavazuje vykonat nevyhnutelné opravy za účelem možnosti opětovného používání zboží v termínu do 30 dní od obdržení reklamace.
- 3) Ortgroup Medical s.r.o. si vyhrazuje právo výměny zboží v případě, že náklady na opravu uzná za nerentabilní.
- 4) V případě zjištění nesprávného fungování zboží je potřebné jej bezodkladně odeslat na adresu prodejce nebo kontaktovat prodejce.
- 5) Před použitím výrobku je potřeba se seznámit s návodem na použití a řídit se instrukcemi v něm uvedenými. Použití výrobku v rozporu s jeho určením ztrácí nárok na záruku. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé použitím výrobku v rozporu s tímto návodem k použití nebo v případě nedodržení instrukcí obsažených v tomto návodu k použití.
- 6) Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé ostrým předmětem, poškození vzniklé v důsledku působení vnějších mechanických sil, znečištění zboží mastnými substancemi či benzínem.
- 7) Produkt zaslaný na servis v rámci reklamace nemůže být epidemiologicky ohrožující.
- 8) TENTO ZÁRUČNÍ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNĚ SPOLU S DOKLADEM O KOUPI. V PŘÍPADĚ REKLAMACE PROSÍME O PŘILOŽENÍ DOKLADU O KOUPI.
- 9) Reklamáce zaslané bez dokladu o koupi nebo bez záručního listu nebudou přijaty (akceptovány).



ANTAR Sp. J.
I.Groniecka-Tarnkowska, A.Tarnkowski
ul. Zawiańska 43 03-068 Warszawa, Polsko
email antar@antar.net tel 22 518 36 00

PRVNÍ KONTAKT: Distribuce:

Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava - Vítkovice
E-mail: ortgroup@ortgroup.cz, www.ortgroup.cz
Tel.: 596 630 615

Datum vydání návodu: 04.02.2025

v1-04.02.2025

