

ZÁRUČNÍ LIST
KŘESLO KLOZETOVÉ MODEL: AT51019

Datum prodeje:

Razítko a čitelný podpis prodávajícího:

1) Firma Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava – Vítkovice tímto dává záruku na výrobek 2 roky ode dne vydání zboží kupujícímu.

2) V záruční době se Ortgroup Medical s.r.o. zavazuje vykonat nevyhnutelné opravy za účelem možnosti opětovného používání zboží v termínu do 30 dní od obdržení reklamace.

3) Ortgroup Medical s.r.o. si vyhrazuje právo výměny zboží v případě, že náklady na opravu uzná za nerentabilní.

4) V případě zjištění nesprávného fungování zboží je potřebné jej bezodkladně odeslat na adresu prodejce nebo kontaktovat prodejce.

5) Před použitím výrobku je potřeba se seznámit s návodem na použití a řídit se instrukcemi v něm uvedenými. Použití výrobku v rozporu s jeho určením ztrácí nárok na záruku. Výrobce nenes odpovědnost za škody vzniklé použitím výrobku v rozporu s tímto návodem k použití nebo v případě nedodržení instrukcí obsažených v tomto návodu k použití.

6) Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé ostrým předmětem, poškození vzniklé v důsledku působení vnějších mechanických sil, znečištění zboží mastnými substancemi či benzínem.

7) TENTO ZÁRUČNÍ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNĚ SPOLU S DOKLADEM O KOUPI. V PŘÍPADĚ REKLAMACE PROSÍME O PŘÍLOŽENÍ DOKLADU O KOUPI.

8) Reklamac bez dokladu o koupi nebudou akceptované.

Výrobce:

ANTAR Sp. J.

I. Groniecka-Tarnkowska, A. Tarnkowski

ul. Zawisłańska 43 03-068 Warszawa, Polsko

email antar@antar.net tel. 22518 36 00

Distribuce:

Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava - Vítkovice

E-mail: ortgroup@ortgroup.cz, www.ortgroup.cz

Tel.: 596 630 615



NÁVOD K POUŽITÍ KŘESLO KLOZETOVÉ MODEL: AT51019



Datum vydání návodu 25.05.2021
Datum poslední revize: 15.03.2022
REV. V 02

POUŽITÍ

Klozetové křeslo je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen použít standardní mísu WC. Svou konstrukcí usnadňuje pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminuje možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňuje manipulaci s pacientem a zvyšuje jeho soběstačnost.

POPIS

Rám křesla je vyroben z povrchově upravených ocelových trubek vysoké pevnosti. Je doplněn, omyvatelným polstrovaným toaletním sedátkem, polstrovanou sedací deskou, opěrkou zad a plastovou toaletní nádobou. Boční pevná madla mají pohodlné polstrované područky. Opěrné nohy jsou výškově nastavitelné a jsou opatřeny protiskluzovými pryžovými nástavci.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Šíře křesla (vč. područek): 59 cm
Výška křesla (vč. opěradla): 82-92 cm
Šíře sedu: 45 cm
Hloubka sedu: 42 cm
Výška sedáku: 42-52 cm
Hmotnost křesla: 15,6-17,3 kg
Nosnost: 100 kg

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním křesla si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním křesla konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Při transportu (automobilem nebo autobusem) nepoužívejte křeslo k sezení.

Křeslo nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost 100 kg.

Při nastavování výšky křesla postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Při užívání křesla musí být všechny nohy v kontaktu s podkladem.


Křeslo není určeno pro používání ve vlhkém prostředí (sprcha apod.).

OBSAH BALENÍ

Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části křesla, tj. rám s opěrnými nohami, opěrkou zad a područkami, polstrovaný sedák a plastovou hygienickou nádobu.

VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ KŘESLA

Pro nastavení výšky křesla vyjměte aretační „E“ pojistku (A) a tahem/tlakem nastavte požadovanou délku nohy. Ve zvolené poloze pojistku zasuňte zpět. Tento postup opakujte u všech čtyř nohou.

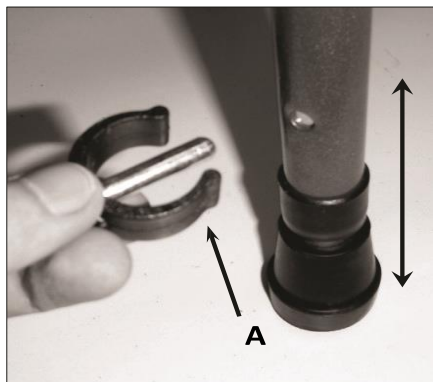

Aretační „E“ pojistka



Umístění aretačních pojistek



MANIPULACE S PLASTOVOU HYGIENICKOU NÁDOBOU A PODRUČKOU

Pro použití křesla sundejte polstrovaný sedák a odstraňte víko plastové nádoby. Nádobu pak lze vysunout z držáků pod hygienickým prkénkem do pravé nebo levé strany.

Vysunutí/zasunutí plastové nádoby

ÚDRŽBA:

Křeslo lze čistit a udržívat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jističích prvků, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.

LIKVIDACE:

Po ukončení používání může být zdravotnický prostředek zlikvidován jako běžný komunální odpad.

NEŽADOUcí PŘÍHODA

V případě „vážného incidentu“ souvisejícího s produktem, který vede přímo nebo nepřímo, může nebo by mohla vést k některé z následujících událostí:

- úmrtí pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
- dočasné nebo trvalé zhoršení zdravotního stavu pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
- vážné ohrožení veřejného zdraví

tato „závažná událost“ musí být nahlášena výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, v němž má uživatel nebo pacient bydliště. V případě ČR je příslušným orgánem SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv, Odbor zdravotnických prostředků. Uživatel /pacient jsou povinni písemně oznámit výrobcí nebo zplnomocněnému zástupci a SÚKL jakoukoliv nežádoucí příhodu, která vznikla v souvislosti s použitím zdravotnického prostředku.

PROHLÁŠENÍ:

Na tento výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě s Nařízením (EU) MDR 2017/745 v platném znění a ve shodě s legislativními požadavky ČR na zdravotnické prostředky v platném znění.

UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma Ortgroup Medical s.r.o. právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.

SERVIS A OPRAVY:

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

ZÁRUKA :

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakémkoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než společností Ortgroup Medical s.r.o. nebo prodávajícím. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé použitím výrobku v rozporu s tímto návodem k použití nebo v případě nedodržení instrukcí obsažených v tomto návodu k použití