

**AT51037**  
**NÁVOD K POUŽITÍ CHODÍTKA**



**MD** **CE**

## CZK

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Nesprávné používání výrobku může vést k poškození zdraví, zranění nebo nehodám. Proto si v zájmu bezpečného a úspěšného používání výrobku pečlivě přečtěte tento návod. Zkontrolujte všechny díly, zda nedošlo k jejich poškození během přepravy. Pokud takové poškození zjistíte, výrobek NEPOUŽÍVEJTE. Pro další informace se obraťte na výrobce.

## OBECNÉ UPOZORNĚNÍ

NEMONTUJTE a nepoužívejte výrobek, dokud si nepřečtete tento návod a neporozumíte mu. Pokud nerozumíte varováním, upozorněním nebo pokynům, obraťte se před pokusem o sestavení výrobku na zdravotnického pracovníka, distributora nebo technika, abyste předešli zranění nebo poškození výrobku. Chodítko není určeno k tomu, aby jej uživatel řídil, když na něm sedí. Při nastavování výšky chodítka by měl být přítomen lékař/terapeut, který zajistí, aby měl uživatel oporu a aby byly správně nastaveny brzdy a dotaženy šrouby. Při rozkládání chodítka se vždy ujistěte, že je sedlová trubka zajištěna a řádně spojena s rámem a že brzdové lanko je uvnitř boční trubky a je k ní pevně připojeno. Po každém výškovém nastavení zkontrolujte brzdové lanko, aby nedošlo k jeho uvolnění. Ujistěte se, že jsou klíčky zajištěny tak, aby se hlavní nosná konstrukce v důsledku tlaku nepohnula. Rychloupínací mechanismus je namontován ve správné poloze a zůstane v uvolněné poloze i při silném zatáhnutí v opačném směru.

**POZNÁMKA:** Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedbalou údržbou, nedostatečným servisem nebo v důsledku nedodržení pokynů uvedených v této příručce.

## NEŽADOUcí PŘÍHODA

V případě "vážného incidentu" souvisejícího s produktem, který vede přímo nebo nepřímo, může nebo by mohla vést k některé z následujících událostí:

- úmrtí pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
- dočasné nebo trvalé zhoršení zdravotního stavu pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
- vážné ohrožení veřejného zdraví

tato "závažná událost" musí být nahlášena výrobci a příslušnému orgánu členského státu, v němž má uživatel nebo pacient bydliště. V případě ČR je příslušným orgánem SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv, Odbor zdravotnických prostředků. Uživatel/pacient jsou povinni písemně oznámit výrobci nebo zplnomocněnému zástupci a SÚKL jakoukoliv nežádoucí příhodu, která vznikla v souvislosti s použitím zdravotnického prostředku.

## PROHLÁŠENÍ

Na tento výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě s Nařízením (EU) MDR

2017/745 v platném znění a ve shodě s legislativními požadavky ČR na zdravotnické prostředky v platném znění.

**POZNÁMKA:** V případě bolesti, alergických reakcí nebo jiných znepokojujících příznaků, které nejsou uživateli jasné a které souvisejí s používáním zdravotnického prostředku, se poraďte se zdravotnickým pracovníkem.

**UPOZORNĚNÍ:** Je zakázáno používat výrobek jinak než v souladu s jeho určením.

**ÚČEL:** Výrobek je určen k poskytování opory při pohybu osobám s omezenou schopností chůze. Chodítko je určeno pro jednu osobu

**INDIKACE:** Fyzikální nebo mentální omezení (např. zrakové postižení), která brání bezpečné manipulaci s chodítkem.

## ROZKLÁDÁNÍ

- Vysuňte rukojeti chodítka směrem ven, zatlačte na obě strany sedátka tak, aby se háčky připevnil k záchytným tyčím, když uslyšíte cvaknutí, znamená to, že jsou správně připevněny.
- Výšku madel a opěradla lze nastavit podle potřeb používání pomocí tlačítek a ovladačů.
- Nákupní taška je vyrobena z neprůhledného nepromokavého materiálu, se zipem v horní části. Nákupní taška je odnímatelná pro snadné přenášení a čištění.
- Výrobek má silné vidlice předních kol, zadní kola jsou vybavena účinnými a bezpečnými plastovými brzdami (včetně hliníkových špalíků), opatřenými dvěma pedály, které pomáhají překonávat nerovnosti a překážky.
- Zvednutí plastové rukojeti uprostřed sedáku může způsobit složení výrobku!

**OBSAH DODÁVKY:** chodítko, taška, uživatelská příručka.



NA ZNAČCE JE UVEDENA MAXIMÁLNÍ HMOTNOST UŽIVATELE!

## NASTAVENÍ TRUBKY RUKOJETI

Stiskněte západku v nastavovací trubce a pohybuje s ní nahoru nebo dolů, čímž upravíte výšku. Po nastavení se ujistěte, že je západka ve správném otvoru.

## SKLÁPĚNÍ

Zvedněte rukojeť sedadla a zatlačte područky dovnitř, abyste výrobek složili.

**UPOZORNĚNÍ:** Během používání a manipulace s výrobkem a při skládání a nastavování mechanismů může hrozit nebezpečí zachycení a/nebo přiskřípnutí částí těla uživatele/spolujezdce v otvorech/ mezerách mezi součástmi. Tyto operace provádějte se zvláštní opatrností. Po dokončení nastavení stabilizujte polohu pevným utažením matic/šroubů.

## POUŽITÍ RUČNÍ BRZDY

- Zatáhněte za brzdu směrem k rukojetím.
- Proveďte jeden z následujících úkonů:
  - NEPOHYBUJTE SE - držte rukojeť brzdy nahoře:
  - POHYB - uvolněte rukojeť brzdy

## ZABLOKOVÁNÍ RUČNÍ BRZDY ODBLOKOVÁNÍ RUČNÍ BRZDY


- Zatlačte na spodní část rukojeti brzdy podle obrázku, dokud neuslyšíte cvaknutí.
- Další informace naleznete v části Odblokování ruční brzdy v této příručce.

## ODBLOKOVÁNÍ RUČNÍ BRZDY


Táhněte rukojeti brzd směrem nahoru, dokud se neuvolní. Uvolněte rukojeť brzdy. Ujistěte se, že brzdové lanko vede podél boční trubky a nepoužitá část je navinutá v přední části chodítka.



Obr. 1 Blokování

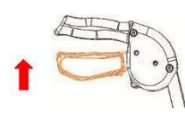

Obr. 2 Brzdění

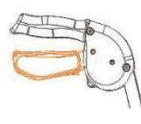

Obr. 3 Volný pohyb

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Chodítko se čtyřmi koly, hliníkové, skládací.

Hmotnost: 7 kg

Celková výška: 81-93 cm

Celková délka: 74 cm

Celková šířka: 65 cm

Šířka ve složeném stavu: 25,5 cm V rozloženém stavu: 25,5 cm

Průměr kol: přední 10", zadní 8"

Výška sedadla: 55 cm

Hloubka sedadla: 55 cm: 20cm

Šířka sedadla: 20 cm: Šířka sedáku: 46cm

Maximální hmotnost uživatele: Maximální hmotnost: 136 kg

**ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ:** chodítko pravidelně čistěte vlažnou mýdlovou vodou. Nepoužívejte silné čisticí prostředky, k čištění nepoužívejte hrubé předměty. Skladujte v suché a chladné místnosti mimo dosah přímého slunečního záření.

## ÚDRŽBA

- Dbejte na to, aby byly všechny přídavné prvky vždy zajištěny.
- Zkontrolujte šroub upevňující sedadlo k bočním dílům. V případě potřeby je utáhněte.
- Poškozené nebo znehodnocené součásti neprodleně vyměňte.

## ÚDRŽBA KOL

- Kolečka čistěte teplou vodou a jemným čisticím prostředkem. Osušte suchým hadříkem.
- Pokud kolečka začínou vrzat, pravidelně je promazávejte tukem 3 v 1.

## LIKVIDACE PRODUKTU

Při likvidaci použitého výrobku je nutné dodržovat příslušné předpisy pro likvidaci odpadu. Výrobek nepatří do komunálního odpadu. Výrobek obsahuje části, které lze dále recyklovat. Proto jej po ukončení používání zlikvidujte předáním do sběrného dvora.

## CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

Zdravotnický pracovník na vlastní odpovědnost určí použití prostředku pro dospělé a děti s ohledem na dostupné varianty/velikosti/potřebné funkce/velikosti a indikace a s ohledem na informace poskytnuté výrobcem.

## ZÁRUČNÍ LIST

Datum prodeje:

Razítko a čitelný podpis prodávajícího:

- 1) Firma Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava – Vítkovice tímto dává záruku na výrobek 2 roky ode dne vydání zboží kupujícímu.
- 2) V záruční době se Ortgroup Medical s.r.o. zavazuje vykonat nevyhnutelné opravy za účelem možnosti opětovného používání zboží v termínu do 30 dní od obdržení reklamace.
- 3) Ortgroup Medical s.r.o. si vyhrazuje právo výměny zboží v případě, že náklady na opravu uzná za nerentabilní.
- 4) V případě zjištění nesprávného fungování zboží je potřebné jej bezodkladně odeslat na adresu prodejce nebo kontaktovat prodejce.
- 5) Před použitím výrobku je potřeba se seznámit s návodem na použití a řídit se instrukcemi v něm uvedenými. Použití výrobku v rozporu s jeho určením ztrácí nárok na záruku. Výrobce nenes odpovědnost za škody vzniklé použitím výrobku v rozporu s tímto návodem k použití nebo v případě nedodržení instrukcí obsažených v tomto návodu k použití.
- 6) Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé ostrým předmětem, poškození vzniklé v důsledku působení vnějších mechanických sil, znečištění zboží mastnými substancemi či benzínem.
- 7) Produkt zaslaný na servis v rámci reklamace nemůže být epidemiologicky ohrožující.
- 8) TENTO ZÁRUČNÍ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNĚ SPOLU S DOKLADEM O KOUPI. V PŘÍPADĚ REKLAMACE PROSÍME O PŘILOŽENÍ DOKLADU O KOUPI.
- 9) Reklamacе zaslané bez dokladu o koupi nebo bez záručního listu nebudou přijaty (akceptovány).



ANTAR Sp. J.

I.Groniecka-Tarnkowska, A.Tarnkowski  
ul. Zawisłańska 43 03-068 Warszawa, Polsko  
email [antar@antar.net](mailto:antar@antar.net) tel 22 518 36 00

### Distribuce:

Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava - Vítkovice

E-mail: [ortgroup@ortgroup.cz](mailto:ortgroup@ortgroup.cz), [www.ortgroup.cz](http://www.ortgroup.cz)

Tel.: 596 630 615



Datum vydání návodu: 15.03.2023

v1-15.03.2023