

AT51044
NÁVOD K POUŽITÍ, CHODÍTKO



Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek, a pečlivě si přečtěte návod k použití. Nepoužívejte výrobek před přečtením a pochopením tohoto návodu. Pokud nerozumíte varováním, upozorněním a doporučením, obraťte se na svého zdravotnického pracovníka nebo prodejce, abyste předešli poškození výrobku a zranění osob.

POZNÁMKA: Zkontrolujte všechny díly, zda nebyly poškozeny při přepravě. Pokud takové poškození zjistíte, výrobek **NEPOUŽÍVEJTE**. Další informace získáte od výrobce.

POUŽITÍ/INDIKACE

Výrobek je určen k podpoře mobility osob s omezenou schopností chůze. Chodítko je určeno pro jednu osobu. Výrobek najde využití v:

- Trénink rovnováhy: chodítko umožňuje pacientům trénovat udržování rovnováhy, což je důležité v rehabilitačním procesu po úrazech nebo neurologických poruchách.
- Udržování správného držení těla: Pacienti mohou používat chodítko k nácviku správného držení těla, což je důležité zejména pro osoby s vadami držení těla nebo problémy se stabilitou.
- Zlepšení pohybové koordinace: Cvičení s chodítkem může pomoci zlepšit koordinaci a kontrolu pohybů, což je důležité pro osoby s neurologickými poruchami.
- Pomoc při rehabilitaci po úrazu: Pomáhá při rehabilitaci po úrazech dolních končetin: chodítko lze použít v procesu rehabilitace po úrazech dolních končetin a pomáhá pacientům postupně získat zpět pohyblivost.
- Zvyšování nezávislosti: Pro některé pacienty může být chodítko nástrojem, který zvyšuje nezávislost v každodenním životě a umožňuje samostatný pohyb.

KONTRAINDIKACE

Fyzická nebo mentální omezení (např. zrakové postižení), která brání bezpečné manipulaci.

- Nedostatečná stabilita páteře: Lidé s vážnými problémy se stabilitou páteře nebo s poraněním páteře nemusí být vhodnými kandidáty pro používání chodítka, protože to může zvýšit riziko dalšího zranění.
- Nekontrolované záchvaty: U osob s nekontrolovanými záchvaty nebo epilepsií může být používání chodítka nebezpečné jak pro pacienta, tak pro jeho okolí.
- Příliš slabá svalová síla: U osob s velmi omezenou svalovou silou může být používání chodítka obtížné nebo neúčinné. V takových případech může být nutný jiný přístup k rehabilitaci, například manuální terapie nebo cvičení na podporu svalové síly.
- Problémy s rovnováhou: U pacientů s vážnými problémy s rovnováhou může být používání chodítka nebezpečné, protože může zvýšit riziko pádu a dalších zranění.
- Nesprávný výběr chodítka může vést k dalším zraněním nebo zhoršení stavu.

UPOZORNĚNÍ:

- 1 Pokud chodítko nepoužíváte, zkontrolujte, zda jsou zapnuté parkovací/brzdy.
- 2 Před použitím zkontrolujte celkový stav kol a jejich bezpečné upevnění.
- 3 Před použitím zkontrolujte, zda brzdy fungují.
- 4 Ujistěte se, že je chodítko zcela vysunutě.
- 5 Při používání chodítka dávejte pozor na své okolí, abyste se pohybovali bezpečně.
- 6 Nepoužívejte chodítko jako invalidní vozík. Výrobek je navržen tak, aby pomáhal při chůzi.
- 7 Neseďte si na chodítko, pokud nejsou parkovací/brzdy zapnuté, protože by mohlo dojít k pohybu chodítka, což by mohlo vést k nebezpečí.
- 8 Opatrně a pomalu se posaďte na sedadlo. V případě potřeby požádejte o pomoc třetí osobu.
- 9 Zkontrolujte, zda jsou nastavitelné rukojeti správně zajištěny.
- 10 Nevkládejte ruce do míst, kde se chodítko sklápí, abyste se nezranili.
- 11 Na rukojeti nebo brzdy nezavěšujte žádné předměty.



1. BEDERNÍ OPĚRKA
2. NÁKUPNÍ TAŠKA
3. TLAČÍTKO RYCHLÉHO UVOLNĚNÍ KOLA
4. PŘEDNÍ VIDLICE
5. PŘEDNÍ KOLA
6. RUKOJEŤ
7. BRZDY
8. NASTAVITELNÉ RUKOJETI
9. ŠROUB PRO NASTAVENÍ VÝŠKY
10. TEXTILNÍ SEDÁTKO
11. RÁM
12. ŠROUB PRO DEMONTÁŽ ZADNÍHO KOLA
13. ZADNÍ KOLA
14. DRŽÁK HOLE

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

ROZMĚRY:

ŠÍŘKA: +-61 CM

HLOUBKA: +- 75 CM

VELIKOST SEDADLA: 46 CM X 25 CM

VÝŠKA SEDADLA: +- 55 CM

VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ RUKOJETÍ: 84-94 CM(5 kroků nastavení)

MAXIMÁLNÍ HMOTNOST UŽIVATELE: 136 KG

Přední kola: 10 palců

Zadní kola: 8 palců

HMOTNOST: +- 7,7 KG

OBSAH BALENÍ:

Chodítko, návod k použití

MONTÁŽ

Vyjměte díly z krabice.

Při vybalování dbejte na to, abyste výrobek nepoškodili.



MONTÁŽ PŘEDNÍCH KOL

Vložte přední kolo do rámu a stisknutím tlačítka jej sestavte.



MONTÁŽ ZADNÍHO KOLA

1) Po vložení zadní trubky se ujistěte, že se otvory překrývají uprostřed.



2) Vložte šroub zevnitř a nasadte černou podložku, poté utáhněte aretační šroub.



3) Ujistěte se, že je aretační šroub utažen.



SEŘÍZENÍ BRZD



Otáčením seřizovacího šroubu proti směru hodinových ručiček zvýšte napětí a poté seřizovací matici zajistěte ve směru hodinových ručiček, přičemž seřizovací šroub držte v klidu.

SESTAVA OPĚRADLA

Zasuňte opěradlo do určených otvorů (jako na obrázku níže).



UPEVNĚNÍ DRŽÁKU HOLE




INSTALACE NÁKUPNÍ TAŠKY



VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ RUKOJETÍ


Odšroubujte oranžový knoflík a nastavte výšku, která vám vyhovuje. Nakonec otočte oranžovým knoflíkem.

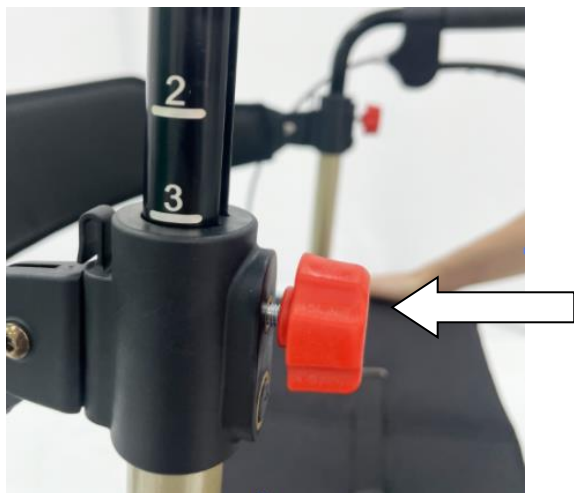

SEŘÍZENÍ PARKOVACÍCH BRZD

Parkovací brzdu zatáhnete zatlačením brzdových rukojetí směrem dolů.

Chcete-li parkovací brzdy uvolnit, uchopte opět rukojeti brzd a táhněte je směrem nahoru, dokud se neuvolní.

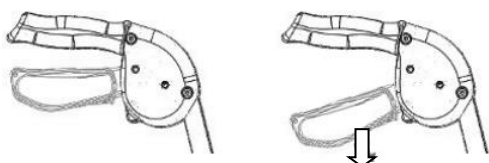

(odemčený stav) (zamčený stav)

POUŽÍVÁNÍ RUČNÍCH BRZD

1. Zatáhněte za brzdou směrem k rukojetím.

2. Proveďte jednu z následujících akcí:

A. ZABRZDĚNÍ- držte rukojeť brzdy nahoře:

B. JÍZDA - uvolněte rukojeť brzdy

POZNÁMKY:

Nestůjte na výrobku. Rukojeti by měly být nastaveny tak, aby byly ve stejné výšce.

NEŽÁDOUCÍ PŘÍHODA

V případě "vážného incidentu" souvisejícího s produktem, který vede přímo nebo nepřímo, může nebo by mohla vést k některé z následujících událostí:

- úmrtí pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
- dočasné nebo trvalé zhoršení zdravotního stavu pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
- vážné ohrožení veřejného zdraví

tato "závažná událost" musí být nahlášena výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, v němž má uživatel nebo pacient bydliště. V případě ČR je příslušným orgánem SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv, Odbor zdravotnických prostředků. Uživatel/pacient jsou povinni písemně oznámit výrobcí nebo zplnomocněnému zástupci a SÚKL jakoukoliv nežádoucí příhodu, která vznikla v souvislosti s použitím zdravotnického prostředku.

PROHLÁŠENÍ

Na tento výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě s Nařízením (EU) MDR

2017/745 v platném znění a ve shodě s legislativními požadavky ČR na zdravotnické prostředky v platném znění.

POZNÁMKY:

Pokud se u vás objeví bolest, alergické reakce nebo jiné znepokojivé, nejasné příznaky související s používáním zdravotnického prostředku, poraďte se s lékařem.

POZNÁMKA: je zakázáno používat výrobek k jinému než určenému účelu.

UPOZORNĚNÍ: Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedbalým čištěním a údržbou nebo vzniklé nedodržením pokynů uvedených v tomto návodu.

CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

Osoby trpící nemocemi, dysfunkcemi nebo zraněními, k jejichž léčbě/rehabilitaci nebo kompenzaci je tento výrobek určen (viz část o určeném použití výrobku v tomto návodu k použití). Výrobek si může uživatel zakoupit samostatně nebo na doporučení lékaře, terapeuta či

jiného odborníka. Ať už si výrobek zakoupíte sami nebo na doporučení lékaře/terapeuta/jiného odborníka, musíte vzít v úvahu dostupné velikosti/potřebné funkce a varianty přístroje, indikace a kontraindikace použití a informace poskytnuté výrobcem.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

Nezapomeňte chodítka pravidelně kontrolovat. Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a knoflíky pevně utaženy. Zkontrolujte, zda brzdy správně fungují. Zkontrolujte opotřebení kol. Zkontrolujte volnost brzdového lanka. Zkontrolujte stránky zda nechybí nějaké součásti. V případě zjištění závad nebo poruch chodítka nepoužívejte, protože hrozí nebezpečí.

Chodítka lze čistit vlhkým hadrem a jemným mýdlem. V případě potřeby lze použít jemný dezinfekční a antibakteriální prostředek. Neotírejte ho hrubými předměty.

Dávejte pozor, aby na rukojetích nebo sedadle nezůstaly zbytky čisticího prostředku, protože by se tyto části mohly stát při používání kluzkými.

SKLADOVÁNÍ

Výrobek skladujte v suché a chladné místnosti, mimo dosah vlhkosti a přímého slunečního záření.

LIKVIDACE PRODUKTU

Při likvidaci použitého výrobku je nutné dodržovat příslušné předpisy pro likvidaci odpadu. Výrobek nepatří do komunálního odpadu.

Výrobek obsahuje části, které lze dále recyklovat. Proto jej po ukončení používání zlikvidujte předáním do sběrného dvora.

ZÁRUČNÍ LIST

Datum prodeje:

Razítko a čitelný podpis prodávajícího:

- 1) Firma Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava – Vítkovice tímto dává záruku na výrobek 2 roky ode dne vydání zboží kupujícímu.
- 2) V záruční době se Ortgroup Medical s.r.o. zavazuje vykonat nevyhnutelné opravy za účelem možnosti opětovného používání zboží v termínu do 30 dní od obdržení reklamace.
- 3) Ortgroup Medical s.r.o. si vyhrazuje právo výměny zboží v případě, že náklady na opravu uzná za nerentabilní.
- 4) V případě zjištění nesprávného fungování zboží je potřebné jej bezodkladně odeslat na adresu prodejce nebo kontaktovat prodejce.
- 5) Před použitím výrobku je potřeba se seznámit s návodem na použití a řídit se instrukcemi v něm uvedenými. Použití výrobku v rozporu s jeho určením ztrácí nárok na záruku. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé použitím výrobku v rozporu s tímto návodem k použití nebo v případě nedodržení instrukcí obsažených v tomto návodu k použití.
- 6) Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé ostrým předmětem, poškození vzniklé v důsledku působení vnějších mechanických sil, znečištění zboží mastnými substancemi či benzínem.
- 7) Produkt zaslaný na servis v rámci reklamace nemůže být epidemiologicky ohrožující.
- 8) TENTO ZÁRUČNÍ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNĚ SPOLU S DOKLADEM O KOUPI. V PŘÍPADĚ REKLAMACE PROSÍME O PŘILOŽENÍ DOKLADU O KOUPI.
- 9) Reklamáce zaslané bez dokladu o koupi nebo bez záručního listu nebudou přijaty (akceptovány).



ANTAR Sp. J.
I.Groniecka-Tarnkowska, A.Tarnkowski
ul. Zawiślańska 43 03-068 Warszawa, Polsko
email antar@antar.net tel 22 518 36 00

PRVNÍ KONTAKT: Distribuce:

Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava - Vítkovice
E-mail: ortgroup@ortgroup.cz, www.ortgroup.cz
Tel.: 596 630 615



Datum vydání návodu: 04.06.2024
v1-04.06.2024