


AT51053
NÁVOD K POUŽITÍ, SEDÁTKO DO VANY

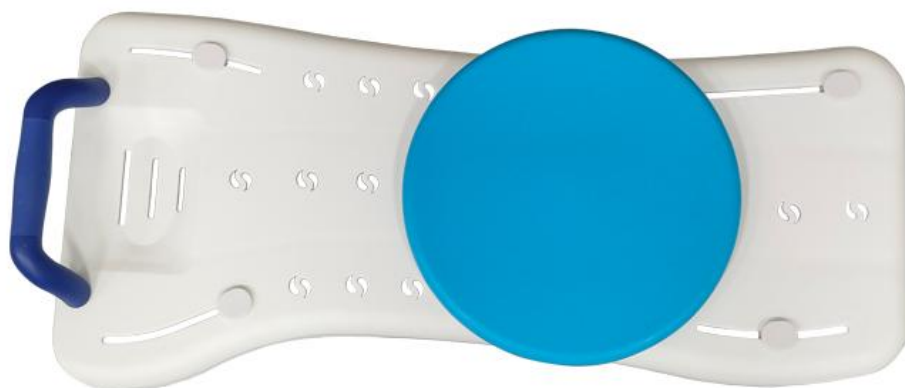

Cz

Děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Výrobek nesmí být používán, dokud si tento návod nepřečtete a plně mu nerozumíte. Pokud nerozumíte upozorněním, pokynům nebo doporučením, obraťte se na odborníka v oblasti zdravotní péče nebo na prodejce, abyste předešli poškození výrobku nebo zranění. **UPOZORNĚNÍ:** Zkontrolujte všechny části výrobku, zda během přepravy nedošlo k jejich poškození. Pokud zjistíte jakékoli poškození, **NESMÍTE VÝROBEK POUŽÍVAT**. Další informace získáte u prodejce.

CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

Osoby trpící nemocemi, dysfunkcemi nebo zraněními, k jejichž léčbě/rehabilitaci nebo kompenzaci je tento výrobek určen (viz část o určeném použití výrobku v tomto návodu k použití). Výrobek si může uživatel zakoupit samostatně nebo na doporučení lékaře, terapeuta či jiného odborníka. Ať už si výrobek zakoupíte sami nebo na doporučení lékaře/terapeuta/jiného odborníka, musíte vzít v úvahu dostupné velikosti/potřebné funkce a varianty výrobku, indikace a kontraindikace použití a informace poskytnuté výrobcem.

URČENÍ VÝROBKU

Sedátko do vany je určeno pro osoby se zdravotním postižením nebo s omezenou pohyblivostí, aby jim umožnilo bezpečné a pohodlné koupání.

INDIKACE

Osoby s omezenou pohyblivostí, které nemohou bezpečně používat klasickou vanu. Senioři vyžadující dodatečnou oporu a stabilitu při koupání. Pacienti v rekonvalescenci po úrazech nebo operacích dolních končetin, kyčlí nebo páteře. Osoby s neurologickými nebo ortopedickými onemocněními způsobujícími poruchy rovnováhy nebo potíže s dlouhodobým stáním. Osoby s nadváhou (v rámci maximální povolené zátěže sedátka).

KONTRAINDIKACE

Fyzická nebo duševní omezení (např. zrakové postižení), která znemožňují bezpečné používání výrobku. Hmotnost uživatele překračující maximální povolenou zátěž (viz technická specifikace). Vany s neobvyklým tvarem nebo kluzkými okraji, které neumožňují stabilní upevnění sedátka. Viditelné poškození konstrukce (praskliny, deformace, opotřebované protiskluzové prvky). Osoby s vážnými poruchami vědomí nebo chování, které znemožňují bezpečné používání. Děti bez dozoru dospělých. Sedátko nesmí být používáno ve stoje ani jako stupínek. Výrobek je určen pouze k sezení.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Vždy se ujistěte, že je sedátko správně a stabilně upevněno na okrajích vany.

Před každým použitím zkontrolujte stav protiskluzových a upevňovacích prvků.

Neprovádějte žádné úpravy konstrukce a používejte výrobek pouze v souladu s jeho určením.

V případě rizika ztráty rovnováhy, mdlob nebo neurologických problémů používejte sedátko pod dohledem pečovatele.

Po každém použití opláchněte sedátko čistou vodou a osušte jej, aby se zabránilo usazování zbytků mýdla a snížení přilnavosti.

UPOZORNĚNÍ: Lavice nemá opěradlo. Výrobek nesmí používat pacienti s poruchami rovnováhy nebo pacienti, kteří z různých důvodů nejsou schopni samostatně sedět. U těchto pacientů může dojít k pádu dozadu a silnému nárazu do okraje vany, což může způsobit vážná zranění.

SEZNAM SOUČÁSTÍ: 1× deska do vany, 1× otočné sedátko, 1× pomocné madlo, 3× plastový šroub (kulatý), 4× plastový šroub (obdélníkový), 4× nožky desky, 4× plastová podložka, 1× návod k použití

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Hmotnost: 2,65 kg

Celková délka: 75,5 cm

Celková výška: 18 cm

Výška sedátka: 4,5 cm

Šířka sedátka: 28 cm

Průměr otočného sedátka: 30 cm

Délka užité plochy (mezi madly): 63 cm

Materiál: PP – polypropylen, TPR – termoplastická pryž (termoplastický elastomer)

Maximální hmotnost uživatele: 100 kg



Tento symbol označuje maximální hmotnost uživatele.

Poznámka: Jednotlivé rozměry výrobku se mohou lišit v rozmezí ± 2 cm.

NÁVOD K MONTÁŽI

Krok 1: Montáž madla

Vložte madlo do dvou otvorů na konci desky do vany.

Pro pohodlí uživatele lze madlo namontovat směrem dovnitř nebo ven.


Zašroubujte šrouby na obou stranách madla a utáhněte, dokud nebude pevně uchyceno.

Krok 2: Montáž nastavitelných nožek

Pomocí obdélníkových plastových šroubů a plastových podložek připevněte čtyři nožky na spodní část desky.

Šroub prochází deskou, podložkou a zašroubuje se do nožky.

Utáhněte, dokud nebude spojení pevné.

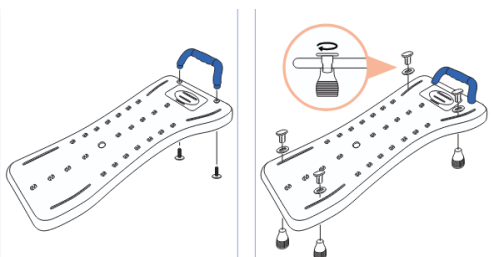

NEŽADOUČÍ PŘÍHODA

V případě "vážného incidentu" souvisejícího s produktem, který vede přímo nebo nepřímo, může nebo by mohla vést k některé z následujících událostí:

- a) úmrtí pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
- b) dočasné nebo trvalé zhoršení zdravotního stavu pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
- c) vážné ohrožení veřejného zdraví

tato "závažná událost" musí být nahlášena výrobci a příslušnému orgánu členského státu, v němž má uživatel nebo pacient bydliště. V případě ČR je příslušným orgánem SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv, Odbor zdravotnických prostředků. Uživatel/pacient jsou povinni písemně oznámit výrobci nebo zplnomocněnému zástupci a SÚKL jakoukoliv nežádoucí příhodu, která vznikla v souvislosti s použitím zdravotnického prostředku.

PROHLÁŠENÍ

Na tento výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě s Nařízením (EU) MDR

2017/745 v platném znění a ve shodě s legislativními požadavky ČR na zdravotnické prostředky v platném znění.

DALŠÍ UPOZORNĚNÍ

V případě bolesti, alergických reakcí nebo jiných znepokojujících, nejasných příznaků spojených s používáním zdravotnického prostředku se poraďte se zdravotnickým pracovníkem.

Používání výrobku jiným způsobem, než je určeno, je zakázáno.

ČIŠTĚNÍ

Po každém použití opláchněte výrobek čistou vodou, abyste odstranili zbytky mýdla, šamponu a jiných přípravků.

K čištění používejte měkký hadřík nebo houbu a jemný čisticí prostředek.

Nepoužívejte agresivní chemikálie, rozpouštědla ani abrazivní prostředky, které mohou poškodit povrch.

Po umytí výrobek osušte nebo nechte volně uschnout na dobře větraném místě.

Pravidelně kontrolujte stav všech částí – zejména upevnění a šroubů.

Pokud se některé šrouby nebo prvky uvolní, utáhněte je.

Pokud zjistíte praskliny, deformace nebo jiné poškození konstrukce, výrobek nepoužívejte, dokud nebude opraven nebo vyměněn.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém místě, mimo dosah přímého slunečního záření.

LIKVIDACE PRODUKTU

Při likvidaci použitého výrobku je nutné dodržovat příslušné předpisy pro likvidaci odpadu. Výrobek nepatří do komunálního odpadu.

Výrobek obsahuje části, které lze dále recyklovat. Proto jej po ukončení používání zlikvidujte předáním do sběrného dvora.

ZÁRUČNÍ LIST

Datum prodeje:

Razítko a čitelný podpis prodávajícího:

1) Firma Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava – Vítkovice tímto dává záruku na výrobek 2 roky ode dne vydání zboží kupujícímu.

2) V záruční době se Ortgroup Medical s.r.o. zavazuje vykonat nevyhnutelné opravy za účelem možnosti opětovného používání zboží v termínu do 30 dní od obdržení reklamace.

3) Ortgroup Medical s.r.o. si vyhrazuje právo výměny zboží v případě, že náklady na opravu uzná za nerentabilní.

4) V případě zjištění nesprávného fungování zboží je potřebné jej bezodkladně odeslat na adresu prodejce nebo kontaktovat prodejce.

5) Před použitím výrobku je potřeba se seznámit s návodem na použití a řídit se instrukcemi v něm uvedenými. Použití výrobku v rozporu s jeho určením ztrácí nárok na záruku. Výrobce nenes odpovědnost za škody vzniklé použitím výrobku v rozporu s tímto návodem k použití nebo v případě nedodržení instrukcí obsažených v tomto návodu k použití.

6) Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé ostrým předmětem, poškození vzniklé v důsledku působení vnějších mechanických sil, znečištění zboží mastnými substancemi či benzínem.

7) Produkt zasláný na servis v rámci reklamace nemůže být epidemiologicky ohrožující.

8) TENTO ZÁRUČNÍ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNĚ SPOLU S DOKLADEM O KOUPI. V PŘÍPADĚ REKLAMACE PROSÍME O PŘILOŽENÍ DOKLADU O KOUPI.

9) Reklamáce zaslané bez dokladu o koupi nebo bez záručního listu nebudou přijaty (akceptovány).



ANTAR Sp. J.
I.Groniecka-Tarnowska, A.Tarnowski
ul. Zawisłańska 43 03-068 Warszawa, Polsko
email antar@antar.net tel 22 518 36 00

