

LOT:

Razítko a čitelný podpis prodávajícího:

Datum prodeje:

- 1) Firma Ortgrou Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava – Vítkovice tímto dává záruku na výrobek 2 roky ode dne vydání zboží kupujícímu.
- 2) V záruční době se Ortgrou Medical s.r.o. zavazuje vykonat nevyhnutelné opravy za účelem možnosti opětovného používání zboží v termínu do 30dní od obdržení reklamace.
- 3) Ortgrou Medical s.r.o. si vyhrazuje právo výměny zboží v případě, že náklady na opravu uzná za nerentabilní.
- 4) V případě zjištění nesprávného fungování zboží je potřebné jej bezodkladně odeslat na adresu Ortgrou Medical s.r.o. – viz bod 1 nebo kontaktovat prodejce.
- 5) Před použitím výrobku je potřeba se seznámit s návodem na použití a řídit se instrukcemi v něm uvedenými. Použití výrobku v rozporu s jeho určením ztrácí nárok na záruku.
- 6) Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé ostrým předmětem, poškození vzniklé v důsledku působení vnějších mechanických sil, znečištění zboží mastnými substancemi či benzínem.
- 7) TENTO ZÁRUČNÍ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNĚ SPOLU S DOKLADEM O KOUPI. V PŘÍPADĚ REKLAMACE PROSÍME O PŘILOŽENÍ DOKLADU O KOUPI.
- 8) Reklamáce bez dokladu o koupi nebudou akceptované.



Výrobce:

ANTAR Sp. J.
I.Groniecka-Tarnkowska, A.Tarnkowski
ul. Zawisłańska 43
03-068 Warszawa, Polsko

Distribuce:

Ortgrou Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava - Vítkovice
E-mail: ortgroup@ortgroup.cz, www.ortgroup.cz
Tel.: 596 630 615

Návod k použití

AT51120 Sedačka do sprchy otočná



Sedačka do sprchy s otočným sedákem (AT51120) je určena pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace mobility, aby jim pomohla použít sprchu. Stolička se doporučuje pro použití ve sprše, vaně, koupelně a dalších vlhkých místnostech, doma i v nemocnici.

Nohy stoličky jsou výškově nastavitelné – zajišťují maximální uživatelský komfort. Sedačka do sprchy je vybavena protiskluzovými násadci.

Po použití je nutné sedačku do sprchy udržovat v čistotě – popř. důkladně umýt. Je možné používat běžné čisticí a dezinfekční pomůcky.

Po vyrazení z provozu je nutné s výrobkem zacházet jako s komunálním odpadem.

HLAVNÍ RYSY

Otočná funkce 360° umožňuje otočení uživatele bez nutnosti jeho zvedání.

Sedátko je vyrobeno z odolného a snadno čistitelného PVC,

lehký hliníkový rám (odolný proti korozi),

průměr sedáku je 36 cm,

5-stupňová regulace výšky (skok , co 2,5 cm) umožňuje přizpůsobit výšku sedáku výšce uživatele (od 40 do 52 cm),

nožky jsou chráněny pryžovými krytkami, se zvýšenou kontaktní plochou se zemí, zajišťují dobrou stabilitu;

snadný a pohodlný způsob uložení sedačky.

Materiál	hliník / plast
Regulace výšky	Ano
Hmotnost uživatele	120 kg
Výška sedáku	40 - 52 cm
Rozměr sedák	36 cm
Rozestup nožek při minimálním vyvýšení sedáku	délka 32x šířka 32 cm
Rozestup nožek při maximálním vyvýšení sedáku sedáku	délka 33 x šířka. 33 cm
Váha výrobku	2,38 kg

MONTÁŽ

1. Pro zjednodušení instalace umístěte sedačku na rovný povrch.
2. Umístěte nohy sedačky do příslušných otvorů na zadní straně sedáku (zapínání na patentky)
3. Umístěte stabilizační rozpěru na místo k tomu
4. Nyní můžete upravit výšku sprchové stoličky. Ujistěte se, že jsou všechny západky zastrčené ve stejné výšce.

UPOZORNĚNÍ

1. Během používání a při skládání a nastavování mechanismů může hrozit nebezpečí zachycení a/nebo přiskřípnutí částí těla uživatele/doprovázející osoby v otvorech nebo mezerách mezi jednotlivými prvky.
2. Před každým použitím výrobku vždy zkontrolujte, zda jsou všechny nastavitelné části bezpečně upevněny.
3. Buďte opatrní na mokřem nebo kluzkém povrch.
4. Nestrkejte prsty do drenážních otvorů v sedadle. Mohlo by dojít ke skřípnutí nebo zachycení prstů.
5. Nepoužívejte vadný či rozbitý výrobek.
6. Udržujte výrobek mimo dosah dětí.
7. Chybějící, poškozené nebo opotřebované díly smí vyměnit pouze autorizované servisní středisko.
8. K čištění nepoužívejte vysokotlaké čističe ani agresivní žíravé čisticí prostředky.
9. Používejte výrobek s maximální opatrností.
10. Zkontrolujte zda je výrobek správně sestaven.
11. Nenaklánějte se nadměrně, zejména dozadu, mohlo by dojít k převrácení..

Dojde-li k závažnému incidentu souvisejícího s produktem, který přímo nebo nepřímo vedl, nebo by mohl vést k některé z následujících situací

- a) úmrtí pacienta/uživatele nebo popř. jiné osoby popř.,
- b) dočasného nebo trvalého zhoršení zdravotního stavu pacienta/uživatele nebo jiné osoby popř.,
- c) vážného ohrožení veřejného zdraví

musí být tato závažná výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém má uživatel nebo pacient bydliště. V případě ČR je příslušným orgánem Úřad pro registraci léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a biocidních přípravků. Uživatel/pacient jsou povinni písemně oznámit výrobcí nebo zplnomocněnému zástupci a SÚKL jakoukoliv nežádoucí příhodu, která vznikla v souvislosti s použitím zdravotnického prostředku. Varování: V případě bolesti, alergických reakcí nebo jiných rušivých příznaků souvisejících s používáním zdravotnického prostředku, přestaňte výrobek používat