

ZÁRUČNÍ LIST

Datum prodeje:

Razítko a čitelný podpis prodávajícího:

1) Firma Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava – Vítkovice tímto dává záruku na výrobek 2 roky ode dne vydání zboží kupujícímu.

2) V záruční době se Ortgroup Medical s.r.o. zavazuje vykonat nevyhnutelné opravy za účelem možnosti opětovného používání zboží v termínu do 30dní od obdržení reklamace.

3) Ortgroup Medical s.r.o. si vyhrazuje právo výměny zboží v případě, že náklady na opravu uzná za nerentabilní.

4) V případě zjištění nesprávného fungování zboží je potřebné jej bezodkladně odeslat na adresu prodejce nebo kontaktovat prodejce.

5) Před použitím výrobku je potřeba se seznámit s návodem na použití a řídit se instrukcemi v něm uvedenými. Použití výrobku v rozporu s jeho určením ztrácí nárok na záruku.

6) Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé ostrým předmětem, poškození vzniklé v důsledku působení vnějších mechanických sil, znečištění zboží mastnými substancemi či benzínem.

7) TENTO ZÁRUČNÍ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNĚ SPOLU S DOKLADEM O KOUPI. V PŘÍPADĚ REKLAMACE PROSÍME O PŘÍLOŽENÍ DOKLADU O KOUPI.

8) Reklamace bez dokladu o koupi nebudou akceptované.



Výrobce:
INTER SP. J.
I.Groniecka-Tarnkowska, A.Tarnkowski
Zawiślańska 43
03-068 Varšava, Polsko

Distribuce:
Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava - Vítkovice
E-mail: ortgroup@ortgroup.cz, www.ortgroup.cz

NÁVOD K POUŽITÍ AT52317 ELEKTRICKÝ INVALIDNÍ VOZÍK



Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt. Před použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod k použití. Nesprávné použití může vést k poškození zdraví, zranění nebo nehodě. Abyste mohli výrobek bezpečně a úspěšně používat, přečtěte si prosím pečlivě tento návod.

POZNÁMKA

Všechny části musí být zkontrolovány, zda nejsou poškozeny během přepravy. Pokud si všimnete takového poškození, NESMÍTE produkt používat. Více informací od výrobce.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Chcete-li zachovat bezpečnost během používání výrobku, postupujte podle níže uvedených pokynů.

Nesmontujte a nepoužívejte výrobek, dokud si nepřečtete a neporozumíte této příručce. Pokud nerozumíte varováním, varováním nebo pokynům, obraťte se před pokusem o sestavení výrobku na zdravotnického pracovníka, distributora nebo technického pracovníka, abyste zabránili zranění nebo poškození výrobku. Každý uživatel by měl požádat svého lékaře nebo terapeuta, aby určil vhodnou variantu regulace a použití.

Před zahájením používání je nutné zkontrolovat, zda byly všechny součásti zajištěny a zda jsou kola a pohyblivé části výrobku v dobrém stavu.

Během používání musí být všechna kola vždy v kontaktu se zemí, což zajišťuje stabilitu.

Nedodržení výše uvedených doporučení může dojít zranění.

POZNÁMKA

Během používání a manipulace s výrobkem a během jeho montáže a seřizování mechanismů může existovat nebezpečí zachycení a/nebo stlačení části těla uživatele/doprovázející osoby v otvorech/drážkách mezi prvky. Tyto kroky by měly být prováděny se zvláštní opatrností. Po dokončení nastavení stabilizujte polohu důkladným utažením matic/šroubů.

NEŽÁDOUCÍ PŘÍHODA

V případě „vážného incidentu“ souvisejícího s produktem, který vede přímo nebo nepřímo, může nebo by mohla vést k některé z následujících událostí:

- a) úmrtí pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
- b) dočasné nebo trvalé zhoršení zdravotního stavu pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
- c) vážné ohrožení veřejného zdraví

Tato „závažná událost“ musí být nahlášena výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, v němž má uživatel nebo pacient bydliště. V případě ČR je příslušným orgánem Úřad pro registraci léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a biocidních přípravků. Uživatel/pacient jsou povinni písemně oznámit výrobcí nebo zplnomocněnému zástupci a SÚKL jakoukoliv nežádoucí příhodu, která vznikla v souvislosti s použitím zdravotnického prostředku.

Varování: V případě bolesti, alergických reakcí nebo jiných rušivých příznaků souvisejících s používáním zdravotnického prostředku, přestaňte výrobek používat nebo se poraďte se svým ošetřujícím lékařem.

POZNÁMKA: Výrobce ani prodejce neodpovídá za škody způsobené špatným užíváním výrobku, špatné údržby, nedostatečného servisu nebo nedodržení pokynů uvedených v tomto manuálu.

POZNÁMKA: Je zakázáno používat výrobek jiným způsobem, než ke kterému je určen. Dodržujte prosím doporučení pro nástup/demontáž/stěhování. V případě nesprávného použití zařízení může hrozit nebezpečí převrácení.

VAROVÁNÍ

- Je zakázáno používat kočárek, pokud je jeho použití v rozporu s místními zákony
- Je zakázáno používat výrobek jiným způsobem než v souladu s jeho zamýšleným účelem

- Horizontální jízda na svahu je zakázána
- Překládka je zakázána a maximální nosnost je 120 kg
- Je zakázáno překračovat bezpečnostní linii každé z teleskopických částí
- Ruční kontakt s elektrickými součástmi je zakázán a před spuštěním kontaktu se ujistěte, že je vozík vypnutý
- Je zakázáno prudce se otáčet, výrazně měnit směr jízdy a nestabilitu, což může způsobit nebezpečí
- Je zakázáno řídit za špatných povětrnostních podmínek nebo v nepříznivém prostředí, tj. silný déšť, silný sníh, vítr a jiné povětrnostní podmínky a kluzké, blátivé a jiné povrchy
- Děti do 14 let mají zakázáno řídit samostatně (přípustný věk řízení závisí na místních zákonech)
- Je zakázáno jezdit bez ochranné přilby. Používejte přilbu nebo jiné ochranné prostředky v souladu s místními předpisy
- Při jízdě je zakázáno pustit řídítka. Je zakázáno opít tělo o řídítka. Za jízdy je zakázáno spouštět nožní pedál
- Je zakázáno libovolně upravovat díly a jezdit s upraveným vozíkem na silnicích
- Je zakázáno jezdit v nebezpečném prostředí, vyhýbat se hořlavým plynům, výparům, kapalinám, prachu atd., které mohou způsobit nebezpečné události, jako je požár nebo výbuch

POUŽÍVÁNÍ

1. Před jízdou zkontrolujte, zda je napájení dostatečné, zda je dostatečný tlak v pneumatikách a zda je brzdný účinek neporušený.
2. Vložte klíč do elektrického zámku, otočte jej do polohy "ON", rozsvítí se kontrolka napájení a napájení se před jízdou zapne.
3. Pravou rukou pomalu otočte páčkou nastavení rychlosti dozadu, abyste získali rychlost, kterou potřebujete k zahájení normální jízdy.
4. Když potřebujete zastavit, nejprve otočte pákou tak, aby rychlost výrazně klesla, poté zabrzděte a zastavte vozík, otočte klíčem do polohy "OFF", to znamená, že napájení bylo přerušeno, vyjměte klíč ze zásuvky.
5. Po použití nabijte baterii podle zbývajících kapacity baterie.

POZNÁMKA

Maximální rychlost je asi 6 km/h, přičemž poloměr otáčení je omezený. Pokud provedete ostrou zatáčku při příliš vysoké rychlosti, těžiště se stane nestabilním, což může vést k převrácení a dalším nebezpečím.

VYUŽITÍ

Výrobek je určen pro pohodlnou přepravu osob s omezenou schopností nebo nedostatkem chůze. Invalidní vozík je určen pro přepravu jedné osoby.

KONTRAINDIKACE

Fyzická nebo duševní omezení (např. zrakové postižení), která brání bezpečné manipulaci s výrobkem.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Invalidní vozík AT52317 je chytrý a lehký skládací čtyřkolový cestovní nástroj. Čtyřkolová konstrukce je stabilní a vhodná pro různé věkové skupiny. Má pokročilou a spolehlivou konstrukční technologii, poskytuje úsporu energie, nezpůsobuje znečištění a hluk během provozu, což přispívá k ochraně životního prostředí. Vozík vybavený lampou, sklopnými loketními opěrkami, košem a taškou.

ROZLOŽENÍ

Musíte umístit kočárek na rovnou zem a vytáhnout spodní malou červenou rukojeť kuličky, abyste odemkli skládací zámek, pak jej zatáhněte dozadu a dopředu, abyste dokončili rozložení, nakonec nainstalujte sedadlo.

SLOŽENÍ

Umístěte kočárek na rovnou zem, před sklopením vyjměte část sedadla a vytáhněte velkou červenou kouli vpravo. Po složení můžete zatáhnout za směrovou tyč a táhnout ji. Pokud ji potřebujete dát do auta nebo přepravit, můžete otevřít rukojeť pro uvolnění směrového signálu a otočit volnou maticí, abyste ji nastavili na nejnižší výšku.



NASTAVENÍ TYČE ŘÍZENÍ A MONTÁŽ SEDADLA

Nejprve je třeba otevřít upevňovací konzoli a otočit uvolňovací maticí. Nastavte tyč řídicí do příslušné výšky v závislosti na výšce uživatele. Po dokončení nastavení utáhněte matici a zajistěte upevňovací držák. Při nastavování tyče řízení dávejte pozor, abyste neodhalili bezpečnostní šňůru.

1. Montáž lampy

- lampa by měla být upevněna šrouby na tyči řízení

Rev.4



Upevnění sedadla: Sedadlo připevníte ke konstrukci vozíku. Drážky na spodní části sedadla zasuneme na konstrukci vozíku a přivednutím páky směrem k tyči řídicí sedadlo nasadíte a zajistíte.. Malý páka pod sedadlem umožňuje nastavení sedadla dopředu a dozadu dle potřeby uživatele. Područky jsou sklopné.



Demontáž: Zatáhnete tyč pod sedadlem a zvednete sedadlo nahoru, abyste sedadlo odstranili.

VOLITELNÉ: Namontujte koš na přední stranu kočárku a tašku na zadní stranu sedadla.

1. Koš by měl být připevněn k podpěrnému držáku pomocí přiložených šroubů a poté zašroubován košem.
2. Zavěste tašku se speciálně ohnutými háčky na volant pod lampou a poté upevněte Velcro.



SCHÉMA FUNKCÍ

LCD přístrojová jednotka, zámek, LED světlomety a displej napájení.

Nasedněte a jakmile otočíte klíčem ve směru hodinových ručiček se napájení zapne, otočte klíčem v opačném směru, napájení se vypne.. Dvojitém otočením klíče ve směru hodinových ručiček zapnete LED světlomety.

Přepínač houkačky - Stisknutím tlačítka houkačky vygenerujete zvuk. (Obr. klakson)

Otočením pravé rukojeti v souladu se směrem znázorněným na obrázku dojde k pohybu vpřed.

Třístupňový přepínač řazení (I, II, III) tři rychlostní stupně odpovídají 2/4/6km/h. Přepínač zpětného převodu "R", stav při stisknutí je zpátečka a pak stav odskoku je rychlostní stupeň vpřed – TATO MOŽNOST JE PRO ČR VYPNUTÁ z důvodu bezpečnosti.

Parkovací systém (dvourychlostní nastavení ruční brzdy).



Klakson

NABÍJENÍ BATERIE

Nabíjecí port je umístěn pod levou částí těla, kryt nabíjecího portu musí být otevřený a nabíjecí port suchý. Nejprve připojte nabíječku k nabíjecí zásuvce vozidla a poté zapojte zástrčku nabíječky do elektrické zásuvky.

Po nabití odpojte napájecí zdroj a poté odpojte konektor, který je připojen k nabíjecímu portu vozidla

Aby byla zajištěna bezpečnost přepravy, není akumulátor plně nabitý. Vzhledem ke spotřebě elektrické energie během přepravního a skladovacího cyklu může mít zařízení při prvním použití nízkou spotřebu nebo ji nemusí mít vůbec. To je normální. Nedělejte si s tím starosti. Nabíjejte zařízení podle způsobu nabíjení.

Pro nabíjení použijte originální nabíječku. Nepoužívejte jiné nabíječky. Společnost nenese odpovědnost za žádné následky způsobené nepoužíváním původní nabíječky.

Doba nabíjení trvá přibližně 5 ~ 8 hodin (v závislosti na kapacitě baterie). Během nabíjení se indikátor na nabíječce rozsvítí červeně, což znamená, že napájení je zapnuto a nabíjí se. Když se indikátor změní z červené na zelenou, znamená to, že baterie je plně nabitá. V tomto okamžiku zastavte nabíjení. Maximální doba nabíjení by neměla překročit 10 hodin. Dlouhodobé nabíjení ovlivní životnost a bezpečnost baterie.

Je zakázáno demontovat nabíječku, protože má vysokonapěťový obvod.

Nepřipojujte nabíječku k napájecímu zdroji bez funkční nabíječky, jinak to poškodí životnost nabíječky a může způsobit další nebezpečí. Při nabíjení by mělo být prostředí prázdné, větrané, bez ohně, bez hořlavých nebo výbušných materiálů kolem.



Rev.18 Rev.19

ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ

Pokud se na povrchu těla vozíku objeví skvrny, otřete je čistou vodou nebo jemným čistícím prostředkem a poté otřete suchým hadříkem.
Tip: Nepoužívejte alkohol, benzín, petrolej nebo jiná korozivní, těkavá chemická rozpouštědla k čištění, jinak by to vážně poškodilo vzhled a vnitřní strukturu karoserie.
K mytí je zakázáno používat vysokotlakou vodní pistolí, aby nedošlo k poškození vnitřních elektronických součástí a kabeláže, protože to může vést k možné nehodě. Pokud se výrobek nepoužívá, zkuste jej uložit do suché a chladné uzavřené místnosti. Snažte se vyhnout skladování venku po dlouhou dobu. Vystavení slunečnímu záření, přehřátí a chladnému vnějšímu prostředí urychluje stárnutí pneumatiky a zkracuje životnost baterie. Videokameru sami nerozebírejte ani neupravujte. Společnost nenese žádné důsledky za nezávislý zásah do vozidla. Je zakázáno používat náhradní díly, které nejsou uvedeny společností. Jejich použitím zrušíte záruku. Pokud potřebujete opravit nebo vyměnit díly, obraťte se na naši společnost nebo na místního prodejce.

Údržba baterií

Neumísťujte výrobek při teplotách nad 40 °C nebo při nízkých teplotách pod -5 °C. Baterii nekládejte do ohně. V těchto případech to může způsobit selhání baterie, přehřátí a dokonce i riziko požáru.
Vyhněte se úplnému vyčerpání baterie a dobíjení. Snažte se zařízení používat co nejčastěji. Tím se výrazně prodlouží životnost baterie. Kromě toho, pokud je baterie používána při pokojové teplotě, může dosáhnout většího dosahu a účinnosti při jízdě, zatímco pokud se používá v prostředí s teplotami pod 0 °C, její životnost a účinnost se zkrátí.
Typicky při -5 °C může být dojezd poloviční oproti normální teplotě. Když teplota stoupne, baterie znovu získá svůj dosah. Pokud produkt nepoužíváte po dlouhou dobu, **nezapomeňte nabíjet alespoň jednou měsíčně, abyste zachovali životnost baterie.** Dlouhodobé nenabíjení může způsobit nadměrné vybití a poškození baterie. Takové poškození nelze opravit.

Poznámka: Laikům je zakázáno demontovat baterii, jinak může dojít k vážným bezpečnostním nehodám v důsledku úrazu elektrickým proudem nebo zkratu! Současně je zakázáno libovolně vyjímat baterii. Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na naši společnost nebo místního distributora, poskytneme vám vysoce kvalitní profesionální služby.

ZPŮSOB ZNEŠKODŇOVÁNÍ VÝROBKU PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

Po vyřazení výrobku z provozu může být zdravotnický prostředek zlikvidován jako běžný komunální odpad, s výjimkou elektrických výrobků – mělo by to být provedeno způsobem vhodným pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení.

ROZSAH DODÁVKY: VOZÍK, TAŠKA, KOŠ, LAMPA, NABÍJEČKA, 4 KLÍČE, SADA ŠROUBŮ, UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Název produktu	INVALIDNÍ VOZÍK, ELEKTRICKÝ, VENKOVNÍ AT52317
Celkové rozměry	980x550x830mm
Velikosti balení	370x550x690mm
Velikost balení	630 * 410 * 745 mm
Výkon motoru	250 W
Šířka sedáku	410 mm
Přední pneumatická kola	10 cali
Litá zadní kola	8 cali
Baterie litowa	36V10Ah
Nabíječka	110 - 220V
Doba nabíjení	5h
Maximální rychlost (km/h)	6km/h
Poloměr otáčení	1,5 m
Max. stupeň nadmořské výšky.	12°
Maximální hmotnost uživatele	120 kg
Vzdálenost od země	9,5 cm
Rozmezí	25 km
Nominální hmotnost / hrubá hmotnost	29 kg
Další díly	Košík, taška

1.2 Obsah záruky

1.2.1 Opravy jsou prováděny zdarma, pokud se jedná o problémy výrobního charakteru nebo související s vadou dílu v záruční době (tento typ opravy bude dále označován jako záruční oprava).

1.2.2 Záruční opravy smí provádět pouze servis ORTGROUP MEDICAL, s.r.o..

1.2.3 Společnost ORTGROUP MEDICAL, s.r.o. nenese odpovědnost za přepravní náklady spojené s opravou a výměnou.

1.2.4 Vyměněné díly jsou majetkem společnosti ORTGROUP MEDICAL, s.r.o.

1.3 Délka záruky a díly, na které se vztahuje záruka

Elektrické díly (motor, ovladač, nabíječka) 12 měsíců od data nákupu

Rám vozíku 12 měsíců od data nákupu

Akumulátor 6 měsíců od data nákupu

1.4 Díly nezahnuté v záruce

Níže uvedené položky nejsou zahrnuté v záruce:

1.4.1 **Díly podléhající opotřebení**, jako jsou brzdové čelisti nebo brzdové destičky, spojka a obložení, pojistky, čalounění a sedadlo, brzdová hadice, těsnění a olejové těsnění, šrouby/matice a podložky, mazací olej a mazivo, uhlíkový kartáč uvnitř motoru, kapalina v akumulátoru, obložení opěrky nohou atd. ;

1.4.2 **Díly, které neovlivňují kvalitu** a výkon vozíku, jako je hluk nebo vibrace;

1.4.3 **Opotřebení způsobené používáním a plynutím času** (např. normální stárnutí a zhoršení kvality laku, galvanizace, plastové díly atd.);

1.4.4 Poškození způsobená absencí údržby nebo nesprávnou obsluhou I skladováním;

1.4.5 Poplatky za průběžné kontroly, nastavení, dolévání oleje, čištění I jiné úkony v rámci údržby;

1.5 Problémy nezahnuté v záruce

Záruka se nevztahuje na problémy vzniklé z následujících důvodů:

1.5.1 Nesprávné skladování;

1.5.2 Manipulace spočívající ve změně nebo přidání do vozíku dílů, které nebyly schváleny ORTGROUP MEDICAL, s.r.o.;

1.5.4 Poškození způsobená použitím jiných než originálních dílů ORTGROUP MEDICAL, s.r.o. nebo jiných dílů nedoporučených společností ORTGROUP MEDICAL, s.r.o.;

1.5.5 Nadměrné nebo nevhodné používání vozíku, jako je přejíždění obrubníků a přetěžování invalidního vozíku cestujícími nebo zbožím;

1.5.6 Jízda v místech, kde by se vozík normálně neměl zapínat nebo používat;

1.5.7 Poškození nebo koroze povrchu v důsledku faktorů prostředí, jako jsou srážky (obsahující chemikálie, mízu ze stromů atd.), kameny, kroupy, bouře, blesky, povodně atd.;

1.5.8 Změna jakýchkoli materiálů nebo skladových dílů neschválených společností ORTGROUP MEDICAL, s.r.o. (nepřepravujte předměty způsobem, který by mohl způsobit ztrátu rovnováhy invalidního vozíku);

1.5.9 Invalidní vozík nesmí tahat ani tlačit žádné jiné vozidlo.



Tato značka označuje maximální hmotnost uživatele!

POZNÁMKA: SADA SE SKLÁDÁ ZE DVOU BALÍČKŮ!

