

NÁVOD K OBSLUZE - OVLADAČ PRO DOPROVOD



Cz

Děkujeme za zakoupení našeho produktu!

Pečlivě si přečtěte tento návod k použití. Výrobek nepoužívejte, dokud se s tímto návodem důkladně neseznámíte a neporozumíte mu. Pokud nerozumíte varováním, upozorněním a doporučením, obraťte se na zdravotnického odborníka nebo prodejce, aby se předešlo poškození výrobku nebo zranění.

UPOZORNĚNÍ:

Zkontrolujte všechny součásti výrobku, zda nejsou poškozeny během přepravy. Pokud zjistíte jakékoli poškození, **VÝROBEK NESMÍ BÝT POUŽÍVÁN**. Další informace získáte u prodejce.

CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

Osoby trpící nemocemi, dysfunkcemi nebo zraněními, k jejichž léčbě/rehabilitaci nebo kompenzaci je tento výrobek určen (viz část o určeném použití výrobku v tomto návodu k použití). Výrobek si může uživatel zakoupit samostatně nebo na doporučení lékaře, terapeuta či jiného odborníka. Ať už si výrobek zakoupíte sami nebo na doporučení lékaře/terapeuta/jiného odborníka, musíte vzít v úvahu dostupné velikosti/potřebné funkce a varianty výrobku, indikace a kontraindikace použití a informace poskytnuté výrobcem.

POUŽITÍ / INDIKACE

Doplňkový ovladač určený pro asistenta uživatele invalidního vozíku. Ovladač je určen pro pečovatele osob se zdravotním postižením, kteří potřebují převzít kontrolu nad vozíkem, například při manévrování v úzkých chodbách nebo na nerovném terénu.

KONTRAINDIKACE

Fyzická nebo mentální omezení (například zrakové postižení), která znemožňují bezpečnou manipulaci s výrobkem.

SEZNAM KOMPONENTŮ

Zadní Vlada, Návod k použití

NÁVOD K POUŽITÍ

POKyny K INSTALACI

Nainstalujte zadní ovladač na pravou rukojeť invalidního vozíku. Ujistěte se, že jste správně utáhli kryt šroubu.

Zasuňte konektor XLR zadního připojovacího kabelu ovladače do nabíjecího portu hlavního ovladače invalidního vozíku.

ZAPNUTÍ OVLADAČE

Ujistěte se, že je hlavní systém invalidního vozíku zapnutý.

Stiskněte tlačítko "**POWER**" na přídatném ovladači.

Po zapnutí je zařízení připraveno k použití.

OVLÁDÁNÍ SMĚRU JÍZDY

Pohybujte **joystickem** požadovaným směrem:

Dopředu – vozík pojede rovně.

Dozadu – vozík začne couvat.

Doleva – vozík zatočí doleva.

Doprava – vozík zatočí doprava.

Čím více nakloníte joystick, tím rychleji se vozík bude pohybovat daným směrem.

REGULACE RYCHLOSTI

Stiskněte tlačítko **(+)** pro zvýšení rychlosti.

Stiskněte tlačítko **(-)** pro snížení rychlosti.

Ujistěte se, že rychlost odpovídá podmínkám prostředí.

POUŽITÍ KLAXONU

Stiskněte tlačítko **klaxsonu (joystick)** pro zvukový signál.

Používejte klaxson pouze v situacích, které vyžadují upozornění okolí.

VYPNUTÍ OVLADAČE

Po použití stiskněte tlačítko "**POWER**" pro vypnutí ovladače.

Ujistěte se, že je hlavní systém vozíku také vypnutý, pokud již nebude používán.

NEŽADOUcí PŘÍHODA

V případě "vážného incidentu" souvisejícího s produktem, který vede přímo nebo nepřímo, může nebo by mohla vést k některé z následujících

událostí:

a) úmrtí pacienta, uživatele nebo jiné osoby,

b) dočasné nebo trvalé zhoršení zdravotního stavu pacienta, uživatele nebo jiné osoby,

c) vážné ohrožení veřejného zdraví

tato "závažná událost" musí být nahlášena výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, v němž má uživatel nebo pacient bydliště. V případě ČR je příslušným orgánem SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv, Odbor zdravotnických prostředků. Uživatel/pacient jsou povinni písemně oznámit výrobcí nebo zplnomocněnému zástupci a SÚKL jakoukoliv nežádoucí příhodu, která vznikla v souvislosti s použitím zdravotnického prostředku.

PROHLÁŠENÍ

Na tento výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě s Nařízením (EU) MDR

2017/745 v platném znění a ve shodě s legislativními požadavky ČR na zdravotnické prostředky v platném znění.

UPOZORNĚNÍ:

Používání výrobku jiným způsobem, než je určeno, je zakázáno.

ČIŠTĚNÍ

Čistěte zařízení **vlhkým hadříkem**.

Nepoužívejte chemické čisticí prostředky.

Vyvarujte se ponoření výrobku do vody.

SKLADOVÁNÍ

Výrobek skladujte na **suchém místě**.
Nevystavujte jej **přímému slunečnímu záření**.
LIKVIDACE PRODUKTU

Při likvidaci použitého výrobku je nutné dodržovat příslušné předpisy pro likvidaci odpadu. Výrobek nepatří do komunálního odpadu.
Výrobek obsahuje části, které lze dále recyklovat. Proto jej po ukončení používání zlikvidujte předáním do sběrného dvora.

ZÁRUČNÍ LIST

Datum prodeje:

Razítko a čitelný podpis prodávajícího:

- 1) Firma Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava – Vítkovice tímto dává záruku na výrobek 2 roky ode dne vydání zboží kupujícímu.
- 2) V záruční době se Ortgroup Medical s.r.o. zavazuje vykonat nevyhnutelné opravy za účelem možnosti opětovného používání zboží v termínu do 30 dní od obdržení reklamace.
- 3) Ortgroup Medical s.r.o. si vyhrazuje právo výměny zboží v případě, že náklady na opravu uzná za nerentabilní.
- 4) V případě zjištění nesprávného fungování zboží je potřebné jej bezodkladně odeslat na adresu prodejce nebo kontaktovat prodejce.
- 5) Před použitím výrobku je potřeba se seznámit s návodem na použití a řídit se instrukcemi v něm uvedenými. Použití výrobku v rozporu s jeho určením ztrácí nárok na záruku. Výrobce nenes odpovědnost za škody vzniklé použitím výrobku v rozporu s tímto návodem k použití nebo v případě nedodržení instrukcí obsažených v tomto návodu k použití.
- 6) Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé ostrým předmětem, poškození vzniklé v důsledku působení vnějších mechanických sil, znečištění zboží mastnými substancemi či benzínem.
- 7) Produkt zaslaný na servis v rámci reklamace nemůže být epidemiologicky ohrožující.
- 8) TENTO ZÁRUČNÍ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNĚ SPOLU S DOKLADEM O KOUPI. V PŘÍPADĚ REKLAMACE PROSÍME O PŘILOŽENÍ DOKLADU O KOUPI.
- 9) Reklamacе zaslané bez dokladu o koupi nebo bez záručního listu nebudou přijaty (akceptovány).



ANTAR Sp. J.
I.Groniecka-Tarnkowska, A.Tarnkowski
ul. Zawisłańska 43 03-068 Warszawa, Polsko
email antar@antar.net tel 22 518 36 00

PRVNÍ KONTAKT: Distribuce:

Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava - Vítkovice
E-mail: ortgroup@ortgroup.cz, www.ortgroup.cz
Tel.: 596 630 615

Datum vydání návodu: 04.02.2025
v1-04.02.2025



