

AT53521

ZAHŘÍVACÍ DEKA K INVALIDNÍMU VOZÍKU



Cz

Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek, a pečlivě si přečtěte návod k použití. Nepoužívejte výrobek, dokud si tento návod nepřečtete a neporozumíte mu. Pokud nerozumíte varováním, upozorněním a doporučením, obraťte se na svého zdravotnického pracovníka nebo prodejce, aby nedošlo k poškození výrobku.

POZNÁMKA: Zkontrolujte všechny součásti, zda nedošlo k jejich poškození během přepravy. Pokud takové poškození zjistíte, výrobek **NEPOUŽÍVEJTE**. Další informace získáte od výrobce.

APLIKACE Výrobek je určen pro uživatele invalidních vozíků, kteří chtějí chránit své tělo před povětrnostními vlivy (sluneční záření, vítr). Potah má zahřívací a ochrannou funkci.

KONTRAINDIKACE

Tělesné nebo duševní omezení (např. porucha zraku), které brání bezpečné manipulaci.

Pokud se uživatel v hřejivém oděvu necítí pohodlně, pokud je oděv příliš velký nebo příliš malý, stísněný, takže brání správné funkci, brání vidění, slyšení a pohybu.

VLASTNOSTI

- kapuce
- zapínání na 2 knoflíky
- prodloužená přední část oděvu, která chrání nohy
- zkrácená zadní část oděvu
- snadné oblékání a svlékání
- Materiál: 100 % polyester
- Typ materiálu: fleece

VELIKOST

Univerzální velikost

Délka zad: 62 cm.

ROZSAH DODÁVKY: Zahřívací deka k invalidního vozíku, návod k použití

POZNÁMKY: V případě bolesti, alergických reakcí nebo jiných rušivých příznaků, které nejsou uživateli v souvislosti s používáním výrobku jasné, je třeba se poradit se zdravotníkem.

UPOZORNĚNÍ: Je zakázáno používat výrobek jinak než v souladu s jeho určením.





UPOZORNĚNÍ: Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nedbalým čištěním nebo v důsledku nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu.

POUŽITÍ

Kapuci je třeba nasadit na hlavu a poté se ujistit, že se žádná část materiálu nezkroutila tak, aby způsobovala nepohodlí. Je třeba dbát na to, aby kapuce nebránila pohodlnému pohybu na vozíku, a zvláštní pozornost je třeba věnovat tomu, aby se výrobek nedostal do kontaktu s koly vozíku.

ČIŠTĚNÍ

Výrobek by se měl prát při teplotě do 40 °C, nebělit ani nechlorovat, nesušit v bubnové sušičce, žehlit při 110 °C, čistit chemicky bez použití rozpouštědel nebo silných pracích prostředků.

	RUČNÍ PRÁNÍ PŘI 40 STUPNÍCH
	Nepoužívejte bělidlo
	Žehlit při maximální teplotě 110 °C
	Nesušte v sušičce
	Nečistěte v čistírně

SKLADOVÁNÍ

Výrobek skladujte v suché chladné místnosti, mimo dosah vlhkosti a přímého slunečního záření.

JAK LIKVIDOVAT VÝROBEK

Po vyřazení výrobku z provozu lze zdravotnický prostředek zlikvidovat jako běžný komunální odpad.

ZÁRUČNÍ LIST

Datum prodeje:

Razítko a čitelný podpis prodávajícího:

- 1) Firma Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava – Vítkovice tímto dává záruku na výrobek 2 roky ode dne vydání zboží kupujícím.
- 2) V záruční době se Ortgroup Medical s.r.o. zavazuje vykonat nevyhnutelné opravy za účelem možnosti opětovného používání zboží v termínu do 30 dní od obdržení reklamace.
- 3) Ortgroup Medical s.r.o. si vyhrazuje právo výměny zboží v případě, že náklady na opravu uzná za nerentabilní.
- 4) V případě zjištění nesprávného fungování zboží je potřebné jej bezodkladně odeslat na adresu prodejce nebo kontaktovat prodejce.
- 5) Před použitím výrobku je potřeba se seznámit s návodem na použití a řídit se instrukcemi v něm uvedenými. Použití výrobku v rozporu s jeho určením ztrácí nárok na záruku. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé použitím výrobku v rozporu s tímto návodem k použití nebo v případě nedodržení instrukcí obsažených v tomto návodu k použití.
- 6) Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé ostrým předmětem, poškození vzniklé v důsledku působení vnějších mechanických sil, znečištění zboží mastnými substancemi či benzínem.
- 7) Produkt zaslaný na servis v rámci reklamace nemůže být epidemiologicky ohrožující.
- 8) TENTO ZÁRUČNÍ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNĚ SPOLU S DOKLADEM O KOUPI. V PŘÍPADĚ REKLAMACE PROSÍME O PŘILOŽENÍ DOKLADU O KOUPI.
- 9) Reklamace zaslané bez dokladu o koupi nebo bez záručního listu nebudou přijaty (akceptovány).



ANTAR Sp. J.

I.Groniecka-Tarnkowska, A.Tarnkowski
ul. Zawiańska 43 03-068 Warszawa, Polsko
email antar@antar.net tel 22 518 36 00

Distribuce:

Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava - Vítkovice

E-mail: ortgroup@ortgroup.cz, www.ortgroup.cz

Tel.: 596 630 615



Datum vydání návodu: 29.04.2024

v1-29.04.2024