



#### Antar ortézy a bandáže

##### Varování

- **Konzultace s lékařem:** Použití ortéz a bandáží doporučujeme konzultovat s lékařem, zvláště pokud trpíte chronickými problémy, zraněními nebo oběhovými obtížemi.
- **Neprovádějte úpravy:** Neupravujte ortézu či bandáž bez konzultace s odborníkem, aby nedošlo ke snížení účinnosti nebo poškození produktu.
- **Nepoužívejte v případě alergie:** Pokud zaznamenáte podráždění, otoky nebo jinou alergickou reakci, okamžitě přestaňte produkt používat a kontaktujte lékaře.
- **Nevhodné pro porušenou pokožku:** Ortézy a bandáže by neměly být používány na otevřené rány, podrážděnou nebo infikovanou pokožku.
- **Nepřetržité nošení:** Nedoporučuje se nosit produkt neustále, pokud to výslovně neurčí lékař. Příliš dlouhé nošení může způsobit zhoršení problémů.

##### Upozornění

- Tento produkt není náhradou za odbornou lékařskou péči.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Dodržujte pokyny k použití a údržbě uvedené v tomto návodu a na obalu.

##### Návod k použití

###### 1. Výběr správné velikosti:

- Změřte postiženou část těla podle tabulky velikostí uvedené na obalu.
- Nesprávná velikost může vést k omezení funkčnosti nebo nepohodlí.

###### 2. Nasazení:

- Ověřte, že ortéza nebo bandáž je čistá a nepoškozená.
- Ujistěte se, že je ortéza nebo bandáž správně umístěná dle návodu, aby poskytovala optimální podporu.