

ZÁRUČNÍ LIST:

Typ: AT51089

Číslo série:

Datum prodeje:

Razítko prodejce a čitelný podpis prodávajícího:

Firma Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00, Ostrava
– Vítkovice, dává od datumu prodeje záruku 2 roky chodítka kolové

1. Během trvání záruční doby se firma Ortgroup medical s.r.o zavazuje zajistit nezbytné opravy, aby bylo chodítka kolové funkční, a to v období 30 dnů od datumu obdržení reklamovaného zboží.
2. Pokud Ortgroup medical s.r.o zjistí, že náklady na opravu jsou nerentabilní, může dojít k výměně výrobku.
3. Pokud zjistíte, že výrobek funguje nesprávně, zašlete jej na adresu firmy Ortgroup medical s.r.o (bod 1) nebo se obraťte na prodejce
4. Než začnete výrobek používat, seznamte se s návodem k obsluze. Nedodržením pokynů výrobce, zaniká nárok na záruční opravu.

Rev. 25.05.2021

NÁVOD K POUŽITÍ

CHODÍTKO KOLOVÉ

AT51089, CA881T, CA820G



 **ORTGROUP
MEDICAL s.r.o.**



POUŽITÍ:

Chodítka je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby osoby se sníženou schopností mobility. Chodítka je určeno pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácviu chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následnérehabilitaci. Je vhodné též pro transport drobných předmětů.

POPIS:

Skládací rám chodítka je vyrobený z povrchově upravených ocelových (AT51089) nebo hliníkových trubek vysoké pevnosti. Rám je doplněn čtyřmi kolečky (třemi u typu 820G), z nichž přední dvě mají uložení v otočné vidlici a ergonomickými výškově nastavitelnými rukojetmi. Kolečka umožňují posouvání chodítka a to tak, že silně uchopíte rukojeti chodítka a lehce tlačíte dopředu. Chodítka je vybaveno brzdami, a to dle druhu: ruční brzda s možností aretace (CA881T, AT51089, CA820G) Chodítka je vybaveno sedátkem (mimo CA820G) a nákupním košíkem.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

	AT51089	CA881T	CA820G
nastavitelná výška madel v cm	80-92	78-89	83-97
celková šířka	58	61,5	52
hmotnost v kg	10,85	8,8	7,3
kolečka o průměru v cm	19,5	19,5	19,5
skládací	ano	ano	ano

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

Před používáním chodítka konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Před používáním chodítka si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě nejasností kontaktujte vašeho dodavatele. Uživatel chodítka musí dbát zvýšené opatrnosti. Uživatel se musí přemísťovat takovým způsobem, aby chodítka od něj neodjelo příliš daleko, jinak může dojít k převrácení. Při transportu nepoužívejte chodítka k sezení, chodítka nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost 120 kg. Při skládání a rozkládání postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů. Je-li chodítka v klidu, vždy zaaretujte brzdy. Při užívání chodítka musí být všechna kola v kontaktu s podkladem.

Varování: Během chůze mějte obě ruce vždy připraveny na páčkách k možnosti okamžitému zabrzdění v případě potřeby!!!

Varování: Nesprávné přenesení těžiště těla při sedu na zadní kola může způsobit převrácení chodítka. Pokud máte pochybnosti, požádejte o pomoc jinou osobu.!!!

SLOŽENÍ A NASTAVENÍ CHODÍTKA:

- CA881T, AT51089

Rám chodítka vyjměte z krabice a stlačením přední a zadní části od sebe rám rozložte. Madla vložte do otvorů v horní části rámu a nastavte požadovanou výšku madel, upevněte pomocí šroubů.

Varování: Optimální nastavení výšky madel vždy konzultujte s vaším ošetřujícím lékařem nebo fyzioterapeutem.

pomocí šroubů. Brzdová lanka by měla vézt zevně rámu i madel. Zasuňte opěrku zad (mimo CA880) zmáčknutím pojistek. Nasadte vidlice s kolečky do otvorů na spodní části rámu a upevněte šrouby. Nakonec nasadte nákupní košík, který se volně zavěsí na rám chodítka pod sedátkem.

Po odklopení boční pojistky, případně uvolnění dalšího jisticího prvku a následném zatlačení na blokovací kloubovou vzpěru, lze rám chodítka jednoduchým způsobem složit do transportní polohy.

Rám chodítka vyjměte z krabice, rozložte směrem od sebe až do polohy, která je vymezena blokovací kloubovou vzpěrou v horní části a následně zapřením jisticího šroubu zajistíte chodítka proti samovolnému složení. Brzdová lanka by měla vézt zevně rámu i madel.

BRZDY:

Před každým použitím vyzkoušejte správnou funkci brzd. Při stlačení páky brzdy směrem nahoru by chodítka mělo přibrzdit až úplně zastavit. Stačením páky směrem dolů by se brzdy měly zaaretovat. Opačným způsobem brzdy odblokujte. Vždy používejte obě brzdy současně.

ÚDRŽBA:

Chodítka lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků, stav koleček a pravidelně promazávat ovládací lanka brzd, ev. odstraňovat mechanické nečistoty všech částí.

SERVIS A OPRAVA:

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který vám poskytne veškeré informace.

ZÁRUKA:

Záruka se poskytuje po dobu 24 měsíců od data převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakémkoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem než výrobcem či dovozcem (viz níže) nebo prodávajícím.

LIKVIDACE: Při likvidaci použitého invalidního vozíku je nutné dodržovat příslušné předpisy pro likvidaci odpadu

Varování: V případě bolesti, alergických reakcí nebo jiných rušivých příznaků souvisejících s používáním zdravotnického prostředku, které jsou pro uživatele nejasné, se poraďte s lékařem.

NEŽADOUCÍ PŘÍHODA:

V případě „vážného incidentu“ souvisejícího s produktem, který vede přímo nebo nepřímo, může nebo by mohla vést k některé z následujících událostí:

- úmrtí pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
 - dočasné nebo trvalé zhoršení zdravotního stavu pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
 - vážné ohrožení veřejného zdraví
- tato „závažná událost“ musí být nahlášena výrobcem a příslušnému orgánu členského státu, v němž má uživatel nebo pacient bydliště. V případě ČR je příslušným orgánem Úřad pro registraci léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a biocidních přípravků.



ANTAR Sp. J.

03-068 Warszawa, ul. Zawiślańska 43
Polska
Tel. 22 518 36 00, Fax 22 518 36 30
www.antar.net e-mail: antar@antar.net



DISTRIBUCE A SERVIS

Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava – Vítkovice E-mail: ortgroup@ortgroup.cz; www.ortgroup.cz Tel./fax: 596 630 615
IČ: 268 58 347 DIČ: CZ 268 58 347

Symboly - Maximální hmotnost uživatele



Datum poslední revize: 25.05.2021