

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KOMPRESOROVÝ NEBULIZAČNÍ SYSTÉM



Složky

- Kryt kompresoru
- Víko
- Ventilační otvory
- Vypínač
- Napájecí kabel
- Úložný prostor (pro příslušenství)
- Výstup vzduchu
- Držák filtru



Standardní příslušenství

- Nebulizátor soupravy
- Náustek
- Vzdušnice
- Maska pro dospělé
- Pediatrická maska
- Vzduchový filtr (5 ks)
- Náustek
- Vzdušnice
- Maska pro dospělé
- Pediatrická maska
- Vzduchový filtr (5 ks)

Návod k použití

Nebulizátor

Tento prostředek je vzduchový kompresorový nebulizační systém se síťovým napájením sloužící jako zdroj stlačeného vzduchu pro zdravotnické účely k použití v domácí péči. Je určen k použití s nebulizátorem soupravy k tvorbě aerosolových částic léčiv za účelem respirační terapie u dětí i dospělých.

Důležité:

Před použitím tohoto prostředku si pečlivě prostudujte tyto pokyny.

Obecné informace

Kompresorový nebulizační systém slouží k aerosolové terapii. A dodává se s nebulizátorem soupravy

⚠ Upozornění

- **Prostředek používejte pouze k zamýšlenému účelu dle popisu v tomto návodu k použití jako kompresorový nebulizační systém pro aerosolovou terapii. Dodržujte pokyny svého lékaře.** Jakákoli jiná forma použití představuje nevhodné použití a může být nebezpečná. Výrobce nenes zodpovědnost za jakékoli poškození způsobené nesprávným, nevhodným nebo neracionálním použitím nebo připojením jednotky k elektrické síti nesplňující bezpečnostní předpisy.
- Tento návod si ponechte pro budoucí použití.
- Neprovozujte jednotku v přítomnosti jakýchkoli anestetických, hořlavých směsí nebo kyslíku.
- Elektromagnetické rušení přesahující limity uvedené v platných evropských normách může ovlivnit správný provoz prostředku. Pokud tento prostředek interferuje s jinými elektrickými systémy, odpojte jej z elektrické sítě a připojte jej do jiné elektrické zásuvky.
- V případě selhání a/nebo poruchy neotevírejte kryt kompresoru, jelikož se nejedná o servisovatelný produkt.
- Použitím jiných než originálních náhradních dílů (např. filtru) můžete narušit správnou funkci prostředku.
- Při použití jakéhokoli elektrického systému je vždy nutné dodržovat důležitá bezpečnostní opatření, včetně následujícího:
 - Používejte pouze originální příslušenství a součásti;
 - Nikdy neponořujte jednotku do vody, jelikož prostředek není chráněn proti vniknutí vody;
 - Pokud máte mokré nebo vlhké ruce, nikdy se nedotýkejte jednotky;
 - Nenechávejte jednotku venku;
 - Při provozu umístěte na stabilní vodorovný povrch;
 - Ujistěte se, že oblast s ventilačními otvory není zakrytá;
 - Nedovolte, aby jednotku používaly bez dozoru děti ani fyzicky postižené osoby;
 - Nevypínejte jednotku pouhým vytažením z elektrické zásuvky
- Před zapojením zařízení se ujistěte, že elektrický výkon uvedený na typovém štítku na spodní straně přístroje odpovídá vašemu hlavnímu napětí a frekvenci.
- Nepoužívejte žádný adaptér (jednoduchý či rozbočovací) a/ani prodlužovací kabel.
- Když jednotku nepoužíváte, nenechávejte ji připojenou. Pokud zařízení není v provozu, odpojte ho z elektrické zásuvky.
- Při instalaci prostředku dbejte pokynů výrobce. Výrobce nelze činit zodpovědným za jakékoli škody způsobené nesprávnou instalací.
- Napájecí kabel nesmí vyměňovat uživatel. V případě poškození napájecího kabelu kontaktujte zdravotnický zákaznický servis se žádostí o výměnu (servis není možný).
- Napájecí kabel je vždy nutné zcela rozvinout, aby se předešlo nebezpečnému přehřívání.
- Před jakýmkoli čištěním nebo výměnou filtru odpojte prostředek z elektrické sítě odpojením od zásuvky nebo vypnutím síťového vypínače.
- Některé části jednotky jsou příliš malé a děti je mohou polknout. Nedovolte, aby k přístroji měly bez dozoru přístup děti nebo osoby se zdravotním postižením.
- Pokud se rozhodnete prostředek nepoužívat, doporučujeme zlikvidovat dle platných místních předpisů.
- Nezapomeňte:
 - Tento prostředek používejte pouze s léčivými předepsanými léky;
 - Používejte příslušenství doporučené vaším lékařem k terapii;
 - Zkontrolujte, že léky předepsané vaším lékařem lze použít s běžnými kompresorovými nebulizačními systémy k aerosolové terapii.



Návod k použití

⚠ Před použitím vytáhněte kompresor z přenosného pouzdra.

Před prvním použitím jednotku prohlédněte a zkontrolujte, zda při přepravě nedošlo k jejímu poškození. Během procedury sedte vzpřímeně a uvolněně.

- Po vybalení prostředku zkontrolujte kompresor a příslušenství, že nevykazují viditelné poškození nebo vady jako např. praskliny v plastovém krytu, které by mohly obnažit elektrické součásti. Případné škody produktu nahlaste zdravotnickému zákaznickému servisu.
 - **Před použitím prostředku je nutné jej vyčistit dle popisu v části „Čištění a dezinfekce příslušenství“**
 - Otevřete nebulizátor otočením horního počítadla ve směru hodinových ručiček.
 - Ujistěte se, že je přepážka uvnitř komory nebulizátoru správně uložena.
 - Do nádobky na léčivo aplikujte předepsané množství léčiva. Maximální objem náplně je 6 ml.
 - Zavřete nebulizátor následovně – uchopte spodní část a otočte horní část ve směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že je jednotka správně uzavřena.
 - Jeden konec vzdušnice připojte k nebulizátoru a druhý konec ke vzduchovému výstupu prostředku.
 - Připojte zahnutý náustek k nebulizátoru.
 - Při použití masky odpojte zahnutý náustek a masku připojte přímo k nebulizátoru.
 - Připojte kompresor k elektrické zásuvce. Ujistěte se, že elektrický výkon uvedený na specifikačním štítku ve spodní části jednotky odpovídá síťovému napětí.
 - Terapii spustíte zapnutím prostředku přepnutím vypínače do polohy „I“.
- POZOR:** Tento prostředek prošel hodnocením pro přerušované použití s 30 minutovým aktivním a 30 minutovým neaktivním cyklem.
- Po dokončení léčby vypněte jednotku nastavením vypínače do polohy „0“ a odpojením vypínače z elektrické zásuvky.
 - Nebulizátor s příslušenstvím omyjte dle popisu v části „Čištění a dezinfekce příslušenství“.

Čištění a údržba

Čištění kompresoru

K čištění vnějšího povrchu jednotky používejte suchý hadřík a jemné detergenty.

POZOR: Během čištění se ujistěte, že vnitřní části jednotky nejsou v kontaktu s tekutinami a napájecí kabel je odpojen.

Čištění a dezinfekce příslušenství

Po každém ošetření:

Nebulizátor lze umýt v mýdlové vodě a následně vydezinfikovat varem ve vodě (max. 10 minut) nebo v autoklávu (max. 121 °C po dobu 10 minut). Doporučujeme vydezinfikovat masku a zahnutý náustek studenými dezinfekčními tekutinami. Nebulizátor vysušte suchým hadříkem. Po vysušení jej připojte k vzduchovému výstupu a zapnutím kompresoru zkontrolujte, že po čištění funguje.

⚠ **Zahnutý náustek, vzdušnice ani masky nesterilizujte varem ani v autoklávu.**

⚠ **Pečlivě dodržujte pokyny k čištění, aby byl zajištěn optimální provoz.**

Výměna nebulizátoru.

Nebulizátor vyměňte po dlouhém období neaktivity nebo pokud bude ucpaný suchými léčivy, prachem atd. Při normálním použití by nebulizátor měl vydržet minimálně 6 měsíců.

Výměna filtru.

Filtr je nutné vyměnit přibližně po 30 hodinách použití nebo když je viditelně špinavý. Otevřete držák filtru a vyměňte filtr za nový. Používejte pouze originální filtry.

⚠ **Nepoužívejte prostředek bez filtru.**

Odstranění problému

Prostředek se nezapne:

- Ujistěte se, že je zástrčka pevně připojena do elektrické zásuvky.
- Ujistěte se, že prostředek byl provozován dle provozních limitů uvedených v této příručce (30 minut zapnutý / 30 minut vypnutý)

Nebulizace nefunguje nebo je slabá:

- Ujistěte se, že konec vzdušnice je pevně připojen k hlavní jednotce a nebulizátoru.
- Zkontrolujte, zda nebulizátor obsahuje léčivo nebo jestli není přeplněn léčivem (maximální náplň je 6 ml)
- Zkontrolujte, zda nebulizační tryska není ucpaná.
- Zkontrolujte, zda je přepážka správně vložena.

Údržba a oprava

Prostředek nikdy neotevírejte. V jednotce se nenachází žádné servisovatelné části. Kompresor nevyžaduje žádné mazání či údržbu.

ZÁRUČNÍ LIST

Razítko a čitelný podpis prodávajícího:

Datum prodeje:

1) Firma Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava - Vítkovice tímto dává záruku na výrobek 2 roky ode dne vydání zboží kupujícímu.

2) V záruční době se Ortgroup Medical s.r.o. zavazuje vykonat nevyhnutelné opravy za účelem možnosti opětovného používání zboží v termínu do 30dní od obdržení reklamace.

3) Ortgroup Medical s.r.o. si vyhrazuje právo výměny zboží v případě, že náklady na opravu uzná za nerentabilní.

4) V případě zjištění nesprávného fungování zboží je potřebné jej bezodkladně odeslat na adresu Ortgroup Medical s.r.o. - viz bod 1 nebo kontaktovat prodejce.

5) Před použitím výrobku je potřeba se seznámit s návodem na použití a řídit se instrukcemi v něm uvedenými. Použití výrobku v rozporu s jeho určením ztrácí nárok na záruku.

6) Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé ostrým předmětem, poškození vzniklé v důsledku působení vnějších mechanických sil, znečištění zboží mastnými substancemi či benzínem.

7) TENTO ZÁRUČNÍ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNĚ SPOLU S DOKLADEM O KOUPI. V PŘÍPADĚ REKLAMACE PROSÍME O PŘILOŽENÍ DOKLADU O KOUPI.

8) Reklamáce bez dokladu o koupi nebudou akceptované.

Výrobce:

ANTAR Sp. J.
I.Groniecka-Tarnowska, A.Tarnowski
ul. Zawiańska 43
03-068 Warszawa, Polsko



Distribuce:

Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava - Vítkovice
E-mail: ortgroup@ortgroup.cz, www.ortgroup.cz
Tel.: 596 630 615

