

ZÁRUKA:

Záruka se poskytuje po dobu 24 měsíců od data převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakémkoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem než výrobcem či dovozcem (viz níže) nebo prodávajícím.



Výrobce:

ANTAR Sp. J.

ul. Zawiślańska 43 03-068 Warszawa, Polsko

Tel. 22 518 36 00, Fax 22 518 36 30

www.antar.net e-mail: antar@antar.net

Dovozce:

Ortgroup Medical s.r.o., 1.Máje 3236/103, 703 00, Ostrava – Vítkovice

E-mail: ortgroup@ortgroup.cz; www.ortgroup.cz Tel./fax: 596 630 615

IČ: 268 58 347 DIČ: CZ 268 58 347



ZÁRUČNÍ LIST :

Typ: AT51088

Číslo série:

Datum prodeje:

Razítko prodejce a čitelný podpis prodávajícího:

Firma Ortgroup Medical s.r.o., 1.Máje 3236/103, 703 00, Ostrava - Vítkovice, dává na chodítko 2 roky záruku od data prodeje.

1.Během trvání záruční doby se firma Ortgroup Medical s.r.o. zavazuje zajistit nezbytné opravy, aby bylo chodítko funkční a to v období 30 dnů od data obdržení reklamovaného zboží.

2.Pokud Ortgroup Medical s.r.o. zjistí, že náklady na opravu jsou nerentabilní, může dojít k výměně výrobku.

3.Pokud zjistíte, že výrobek nefunguje správně, zašlete jej na adresu firmy Ortgroup Medical s.r.o nebo se obraťte na prodejce.

4.Než začnete výrobek používat, seznámte se s návodem k obsluze. Nedodržáním pokynů výrobce, zaniká nárok na záruční opravu.

NÁVOD K POUŽITÍ

CHODÍTKO AT51088



Datum vydání návodu 23.07.2021

Datum poslední revize: 23.07.2021

V1-2 23.07.2021

POUŽITÍ:

Chodítko je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Chodítko je určeno pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácviku chůze, poutávacích a pooperačních stavech a následné rehabilitaci. Je vhodné též pro transport drobných předmětů.

- Vyrobeno z vyztuženého hliníku.
- Součástí balení jsou dvě kolečka a dvě nohy.
- 3v1: lze jej použít jako chodítko na 4 pevných nožkách, kloubové chodítko nebo chodítko na dvou kolečkách, které usnadňují pohyb.
- Chodítko lze jednoduše sestavit nebo rozložit, složení s pomocí jediného tlačítka
- Chodítko má 8 úrovní výškového nastavení
- Ergonomické rukojeti
- Snadné skladování díky skládacímu rámu

UPOZORNĚNÍ:

1. Před použitím chodítka si přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.
2. Používání chodítka na zemi, která neposkytuje pevnou oporu, tj. mokré, zledovatělé, mastné nebo silně obroušené, je nepřijatelné z důvodu nebezpečí pádu.
3. Před každým použitím - proveďte vizuální kontrolu všech konstrukčních prvků výrobku, včetně: - pečlivě zkontrolujte stabilitu a stav nosného rámu.
4. Chodítko slouží pouze k podepření pro jednoho uživatele, je zakázáno na chodítko stát.
5. Nepřekračujte maximální výšku.
6. Je možné zachytit prsty v oblasti skládání rámu chodítka.
7. Chodítko nepoužívejte v případě jakéhokoli viditelného nebo znatelného poškození (např. zlomený rám), protože by mohlo dojít k nehodě.
8. Nenaklánějte se za chodítko. Může způsobit pád uživatele.
9. Nekývejte chodícím rámem. Může způsobit pád uživatele.
10. Nepoužívejte, pokud hmotnost uživatele přesahuje 115 kg.
11. Vyhněte se kontaktu s otevřeným ohněm. Výrobek se může vznítit.
12. Ujistěte se, že pojistka spony na patce nebo kole je po instalaci ve stejné výšce. V opačném případě výrobek nemusí být stabilní a otvor se může deformovat.

NEŽADOUČÍ PŘÍHODA

V případě „vážného incidentu“ souvisejícího s produktem, který vede přímo nebo nepřímo, může nebo by mohla vést k některé z následujících událostí:

- a) úmrtí pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
- b) dočasné nebo trvalé zhoršení zdravotního stavu pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
- c) vážné ohrožení veřejného zdraví

tato „závažná událost“ musí být nahlášena výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, v němž má uživatel nebo pacient bydliště. V případě ČR je příslušným orgánem Státní ústav pro kontrolu léčiv, Odbor zdravotnických prostředků. Uživatel/pacient jsou povinni písemně oznámit výrobcí nebo zplnomocněnému zástupci a SÚKL jakoukoliv nežádoucí příhodu, která vznikla v souvislosti s použitím zdravotnického prostředku.

Na tento výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě s Nařízením (EU) MDR 2017/745 v platném znění a ve shodě s legislativními požadavky ČR na zdravotnické prostředky v platném znění.

POZOR:

V případě bolesti, alergických reakcí nebo jiných rušivých příznaků souvisejících s používáním zdravotnického prostředku, které jsou pro uživatele nejasné, se poraďte s lékařem.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Výška: 75-93 cm, 8 úrovní nastavení každé 2 cm

Šířka mezi držadly: 46 cm

Hmotnost s koly: 2,65 kg, s nohami: 2,35 kg

Hloubka: 40 cm

Tloušťka ve složeném stavu: 12 cm

Průměr kol: 12,5 cm

Šířka: (vpředu) 46 cm, (vzadu) 51 cm

Nosnost: 115kg.


Symbols - Maximální hmotnost uživatele



ÚDRŽBA:

Chodítko lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků, stav pryžových nástavců a polohu aretačních pojistek, ev. odstraňovat mechanické nečistoty všech částí. V případě nutnosti vyměňte opotřebované pryžové nástavce.

PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

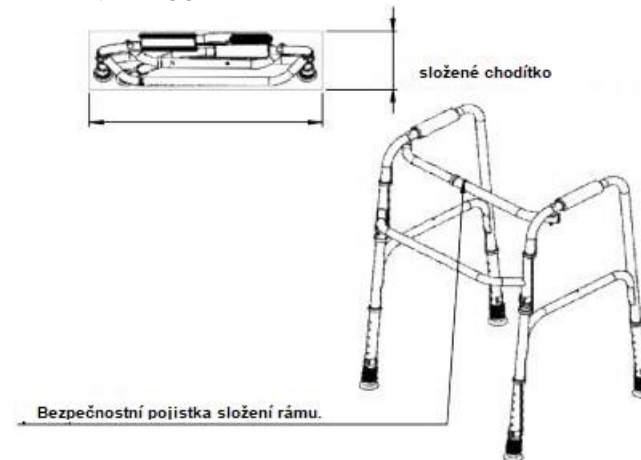

Chcete-li chodítko složit, stiskněte západkové tlačítko a zatahněte po stranách chodítka dovnitř a poté chodítko složte.

POHYB S CHODÍTKEM SE ZAPNUTOU FUNKCÍ KROKOVÁNÍ

Funkce chůze se zapne, když jsou pojistky blokády funkce chůze v přední výztuži. Postavte se k chodítku a držte se oběma rukama za madla chodítka. Pohyb s tímto typem náčinní spočívá ve střídavém zvedání stran chodítka nahoru a jejich posouvání dopředu a přidávání dolních končetin.


POHYB CHODÍTKA S BLOKACÍ KROKOVACÍ FUNKCE

Pro zajištění trvalé funkce chodítka odstraňte dva zajišťovací šrouby umístěné na horním vodorovném prvku podpírajícím rámu a vložte je do otvorů umístěných ve stejné výšce na svislém prvku rámu. Pohyb s pevným chodítkem spočívá v jeho posunutí dopředu a následném přidání končetin. Pokud chcete znovu použít funkci chůze nebo chodítko složit, měly by být pojistky umístěny zpět do vodorovného výztužného prvku.

POHYB S CHODÍTKEM S KOLEČKY

Chcete-li získat chodítko s kolečky, nejprve jej uzamkněte (vypněte funkci krokování), sejměte přední nohy a nahraďte je kolečky. Nezapomeňte zkontrolovat výšku všech nohou (musí být stejně dlouhé).

Před prvním použitím výrobku upravte jeho výšku. Chcete-li to provést, stiskněte pojistku a zajistěte ji ve zvolené úrovni - stejně pro všechny čtyři nohy. V opačném případě nemusí být výrobek stabilní a otvor může být zdeformován.

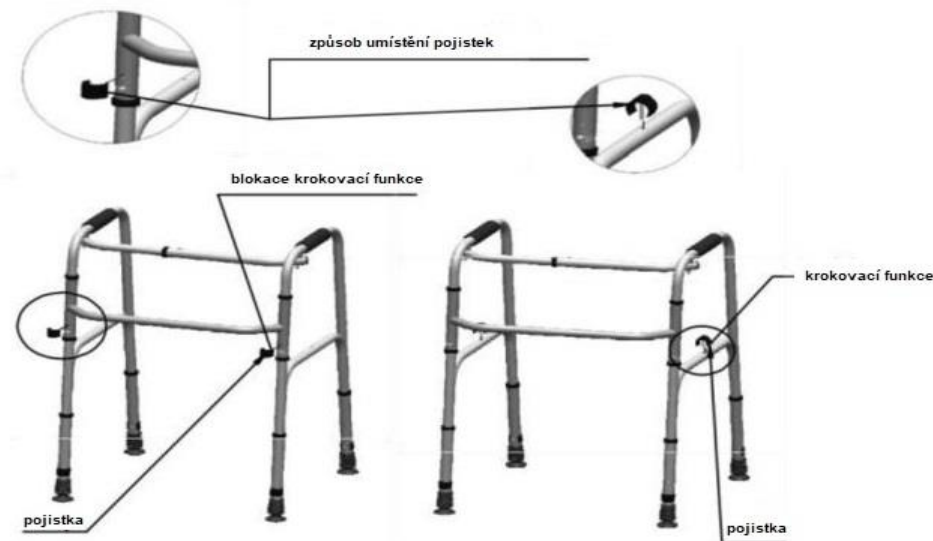

LIKVIDACE PRODUKTU

Při likvidaci použitého chodítka je nutné dodržovat příslušné předpisy pro likvidaci odpadu.

Důrazně doporučujeme kontaktovat vašeho místního autorizovaného dodavatele, který zajistí likvidaci vašeho chodítka.