

## ZÁRUČNÍ LIST

Typ chodítka: AT51015

Razítko a čitelný podpis prodávajícího:

Datum prodeje:

- 1) Firma Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava – Vítkovice tímto dává záruku na výrobek 2 roky ode dne vydání zboží kupujícímu.
- 2) V záruční době se Ortgroup Medical s.r.o. zavazuje vykonat nevyhnutelné opravy za účelem možnosti opětovného používání zboží v termínu do 30dní od obdržení reklamace.
- 3) Ortgroup Medical s.r.o. si vyhrazuje právo výměny zboží v případě, že náklady na opravu uzná za nerentabilní.
- 4) V případě zjištění nesprávného fungování zboží je potřebné jej bezodkladně odeslat na adresu Ortgroup Medical s.r.o. – viz bod 1 nebo kontaktovat prodejce.
- 5) Před použitím výrobku je potřeba se seznámit s návodem na použití a řídit se instrukcemi v něm uvedenými. Použití výrobku v rozporu s jeho určením ztrácí nárok na záruku.
- 6) Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé ostrým předmětem, poškození vzniklé v důsledku působení vnějších mechanických sil, znečištění zboží mastnými substancemi či benzínem.
- 7) TENTO ZÁRUČNÍ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNĚ SPOLU S DOKLADEM O KOUPI. V PŘÍPADĚ REKLAMACE PROSÍME O PŘILOŽENÍ DOKLADU O KOUPI.
- 8) Reklamace bez dokladu o koupi nebudou akceptované.

### Výrobce:

ANTAR Sp. J.  
I.Groniecka-Tarnkowska, A.Tarnkowski  
ul. Zawiślańska 43  
03-068 Warszawa, Polsko



### Distribuce:

Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava - Vítkovice  
E-mail: [ortgroup@ortgroup.cz](mailto:ortgroup@ortgroup.cz), [www.ortgroup.cz](http://www.ortgroup.cz)  
Tel.: 596 630 615

# NÁVOD K POUŽITÍ

## CHODÍTKO KOLOVÉ

AT02008

AT051015



## **POUŽITÍ:**

Chodítka je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Chodítka je určeno pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácvičku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následné rehabilitaci. Je vhodné též pro transport drobných předmětů.

## **POPIS:**

Skládací rám chodítka je vyrobený z povrchově upravených duralových trubek vysoké pevnosti. Rám je doplněn čtyřmi kolečkami (třemi u typu AT51015), z nichž přední mají uložení v otočné vidlici a ergonomickými výškově nastavitelnými rukojetmi. Kolečka umožňují posunování chodítka a to tak, že silně uchopíte rukojeti chodítka a lehce tlačíte dopředu. Chodítka je vybaveno bowdenovými brzdami s možností aretace. Chodítka je vybaveno sedátkem a opěrkou zad.

## **TECHNICKÉ PARAMETRY:**

	AT02008	AT51015
nastavitelná výška madel v cm	77-94	77-95
výška sedátka	x	54
šířka rozloženého chodítka	66	64
průměr kolečka (přední) v cm	19,5	19,5
průměr kolečka (zadní) v cm	17	19,5
hmotnost (kg)	5,5	7,4
nosnost (kg)	135	135

## **BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:**

Před používáním chodítka konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem. Před používáním chodítka si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě nejasností kontaktujte vašeho dodavatele. Uživatel chodítka musí dbát zvýšené opatrnosti. Uživatel se musí přemísťovat takovým způsobem, aby chodítka od něj neodjelo příliš daleko, jinak může dojít k převrácení. Při transportu nepoužívejte chodítka k sezení, chodítka nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost 135 kg. Při skládání a rozkládání postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů. Je-li chodítka v klidu, vždy zaaretujte brzdy. Při užívání chodítka musí být všechna kola v kontaktu s podkladem.

## **SLOŽENÍ A NASTAVENÍ CHODÍTKA:**

- AT02008

Rám chodítka vyjměte z krabice a stlačením přední a zadní části od sebe rám

rozložte. Madla vložte do otvorů v horní části rámu a nastavte požadovanou výšku madel, upevněte pomocí šroubů. Brzdová lanka by měla vézt zevně rámu i madel. Zasuňte opěrku zad zmáčknutím pojistek. Nasadte vidlice s kolečkami do otvorů na spodní části rámu a upevněte šrouby. Nakonec nasadte tašku, která se volně zavěsí na rám chodítka pod sedátkem.

Po odklopení boční pojistky, případně uvolnění dalšího jisticího prvku a následném zatlačení na blokovací kloubovou vzpěru, lze rám chodítka jednoduchým způsobem složit do transportní polohy.

- AT51015

Rám chodítka vyjměte z krabice, rozložte směrem od sebe až do polohy, která je vymezena blokovací kloubovou vzpěrou v horní části a následně zapřením jisticího šroubu zajistíte chodítka proti samovolnému složení. Brzdová lanka by měla vézt zevně rámu i madel.

## **BRZDY:**

Před každým použitím vyzkoušejte správnou funkci brzd. Při stlačení páky brzdy směrem nahoru by chodítka mělo přibrzdit až úplně zastavit. Stačením páky směrem dolů by se brzdy měly zaaretovat. Opačným způsobem brzdy odblokujte. Vždy používejte obě brzdy současně.

## **ÚDRŽBA:**

Chodítka lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků, stav koleček a pravidelně promazávat ovládací lanka brzd, ev. odstraňovat mechanické nečistoty všech částí.

## **SERVIS A OPRAVA:**

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který vám poskytne veškeré informace.

## **ZÁRUKA:**

Záruka se poskytuje po dobu 24 měsíců od data převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřizením nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem než výrobcem či dovozcem (viz níže) nebo prodávajícím.