

ZÁRUČNÍ LIST

Datum prodeje:

Razítko a čitelný podpis prodávajícího:

1) Firma Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava – Vítkovice tímto dává záruku na výrobek 2 roky ode dne vydání zboží kupujícímu.

2) V záruční době se Ortgroup Medical s.r.o. zavazuje vykonat nevyhnutelné opravy za účelem možnosti opětovného používání zboží v termínu do 30dní od obdržení reklamace.

3) Ortgroup Medical s.r.o. si vyhrazuje právo výměny zboží v případě, že náklady na opravu uzná za nerentabilní.

4) V případě zjištění nesprávného fungování zboží je potřebné jej bezodkladně odeslat na adresu prodejce nebo kontaktovat prodejce.

5) Před použitím výrobku je potřeba se seznámit s návodem na použití a řídit se instrukcemi v něm uvedenými. Použití výrobku v rozporu s jeho určením ztrácí nárok na záruku.

6) Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé ostrým předmětem, poškození vzniklé v důsledku působení vnějších mechanických sil, znečištění zboží mastnými substancemi či benzínem.

7) TENTO ZÁRUČNÍ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNĚ SPOLU S DOKLADEM O KOUPI. V PŘÍPADĚ REKLAMACE PROSÍME O PŘILOŽENÍ DOKLADU O KOUPI.

8) Reklamáce bez dokladu o koupi nebudou akceptované.

Výrobce:
ANTAR Sp. J.
I.Groniecka-Tarnkowska, A.Tarnkowski
ul. Zawiańska 43
03-068 Warszawa, Polsko

Distribuce:
Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava - Vítkovice
E-mail: ortgroup@ortgroup.cz, www.ortgroup.cz



NÁVOD K POUŽITÍ AT51033

Nafukovací umyvadlo na vlasy s přenosnou sprchou



Poznámky a upozornění

Před použitím produktu je povinné si přečíst obsah této příručky. Výrobek neskladujte na přímém slunečním světle a umísťte dál od zdroje tepla. U výrobku pravidelně kontrolujte, zda-li není poškozen. V případě poškození výrobku ho ihned přestaňte používat.

Poznámka: Zkontrolujte všechny části výrobku a ubezpečte se, že žádný z nich nebyl během přepravy poškozený. Pokud k takovému poškození dojde, výrobek NEPOUŽÍVEJTE a obraťte se na prodejce.

NEŽADOUcí PŘÍHODA

V případě „vážného incidentu“ souvisejícího s produktem, který vede přímo nebo nepřímo, může nebo by mohla vést k některé z následujících událostí:

- a) úmrtí pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
- b) dočasné nebo trvalé zhoršení zdravotního stavu pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
- c) vážné ohrožení veřejného zdraví

Tato „závažná událost“ musí být nahlášena výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, v němž má uživatel nebo pacient bydliště. V případě ČR je příslušným orgánem Úřad pro registraci léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a biocidních přípravků. Uživatel/pacient jsou povinni písemně oznámit výrobcí nebo zplnomocněnému zástupci a SÚKL jakoukoliv nežádoucí příhodu, která vznikla v souvislosti s použitím zdravotnického prostředku.

Varování: V případě bolesti, alergických reakcí nebo jiných rušivých příznaků souvisejících s používáním zdravotnického prostředku, přestaňte výrobek používat nebo se poradte se svým ošetřujícím lékařem.

POZNÁMKA: Výrobce ani prodejce neodpovídá za škody způsobené špatným užíváním výrobku, špatné údržby, nedostatečného servisu nebo nedodržení pokynů uvedených v tomto manuálu.

POZNÁMKA: Je zakázáno používat výrobek jiným způsobem, než ke kterému je určen.

OBECNÉ UPOZORNĚNÍ

NEPOUŽÍVEJTE výrobek než si pečlivě přečtete tento manuál a zcela neporozumíte jeho obsahu. Pokud nerozumíte některým pokynům, kontaktujte prodejce nebo výrobce, aby nedošlo k úrazu nebo k poškození výrobku.

Umyvadlo je určeno k mytí vlasů osobám se sníženou pohyblivostí nebo osobám se zdravotním postižením.

MONTÁŽ/ POUŽITÍ

1) Nafoukněte umyvadlo. Ventil je zpětný, proto vzduch v umyvadle neuniká, ani když je ventil otevřený. Ventil uzavřete.
Chcete-li vzduch vypustit, tlačte prsty na boční stěny ventilu dokud se umyvadlo nevypustí.

2) Umísťte umyvadlo na rovný povrch.

3) Umísťte odtokovou hadici do umyvadla nebo dřezu. Ujistěte se, že je níže než umyvadlo nebo dřez, nechte vodu téct.

4) Při použití vypouštěcí nádoby otevřete vypouštěcí ventil.

5) Naplňte vak na vodu, průtok vody v hadici se nastaví odšroubováním/otočením ventilu.

6) Umísťte nafukovací umyvadlo pod krk uživatele a upravte ji tak, dokud nebude pohodlná.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Nafukovací umyvadlo je 21 cm hluboké, dvojité vyztužené pro větší odolnost a pohodlí. Obsahuje vypouštěcí ventil a hadici pro snadné a rychlé odstranění vody. Výrobek má vodní vak o kapacitě 10l, který lze použít v případě, pokud nemáte přístup ke zdroji tekoucí vody.

Výrobek obsahuje: nafukovací umyvadlo s hadicí, vodní vak se sprchou
Materiál: PVC

ČIŠTĚNÍ

K čištění nepoužívejte ostré, abrazivní předměty ani agresivní čisticí prostředky (např. kyselina, rozpouštědla). Nejlepší je vyčistit všechny části vlhkým hadříkem a jemnými domácími prostředky. Nesušte na topení ani přímém slunci.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Používejte pouze teplou vodu do 38 C, aby nedošlo k opaření. Nenechávejte pacienta bez dozoru (hlavně při napuštěném umyvadle). Pravidelně kontrolujte těsnost umyvadla, aby nedošlo k poškození okolních věcí vodou. Umyvadlo nesmí být používáno k jinému účelu, než ke kterému je určeno.

Rozměry:

Délka: 60 cm

Šířka: 50 cm

Výška: 20 cm

Výška opěrky hlavy: 10 cm

Délka odtokové hadice: 70 cm

POZNÁMKA: Jakékoliv činnosti při používání výrobku vyžadují pomoc pečovatele.